

Ottilan Akustik Serum olejowe do uszu 20 ml

Cena: 16,88 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	20 ml
Producent	SIMPLY YOU PHARMACEUTICALS
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Serum

Opakowanie

20ml

Działanie


Wyrób medyczny **Ottilan Akustik** w delikatny sposób rozpuszcza i usuwa nadmiar woskowiny. Produkt zawiera unikalne połączenie składników MEDICAL CLEAN COMPLEX (naturalna oliwa z oliwek, ekstrakt z granatu i rozmarynu), które redukują nadmierną produkcję woskowiny i przeciwdziałają powstawaniu czopów woskowinowych, redukując tym samym ryzyko zapalenia ucha. Opakowanie opatrzone zostało w pipetę, umożliwiającą łatwą i delikatną aplikację nawet u dzieci powyżej 3. miesiąca życia.

Wskazania

Usuwanie nadmiaru woskowiny i zapobieganiu jej gromadzeniu się. **Ottilan Akustik** nadaje się do regularnej higieny uszu. Wyrób medyczny polecany jest szczególnie osobom noszącym aparaty słuchowe lub słuchawki ze względu na skłonność do gromadzenia się czopów woskowinowych.

Sposób użycia

Przed użyciem należy ogrzać butelkę, trzymając ją w dłoni przez około 1 minutę. Przechylić głowę, aby krople mogły swobodnie spłynąć do kanału słuchowego. Następnie za pomocą pipety nanieść zalecaną liczbę kropli do kanału słuchowego. Pozostawić na co najmniej 5

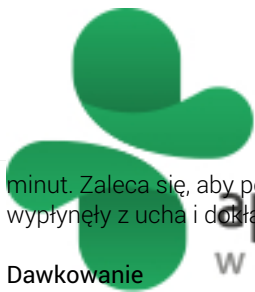

minut. Zaleca się, aby podczas zabiegu głowa była lekko pochylona. Następnie wyprostować głowę i pozwolić, aby pozostałości wypłynęły z ucha i dokładnie wytrzeć zewnętrzną część kanału słuchowego.

Dawkowanie

Zapobieganie nadmiernemu tworzeniu się woskowiny u dzieci do 12. roku życia i niemowląt powyżej 3. miesiąca życia - aplikować 1-2 krople do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu, maksymalnie 2 krople 3 razy w tygodniu.

Zapobieganie nadmiernemu tworzeniu się woskowiny u dorosłych i dzieci od 12. roku życia - aplikować 2-3 krople do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu, maksymalnie 4 krople 3 razy w tygodniu.

W przypadku tworzenia się czopa woskowinowego - aplikować 3-4 krople 3-5 razy dziennie przez 4-5 dni, aż czop woskowinowy i pozostałości woskowiny rozpuszczą się i zostaną usunięte, maksymalnie 5 kropli 5 razy dziennie przez 5 dni.

Zapobieganie zatrzymywania wody w uchu u dzieci do 12. roku życia i niemowląt powyżej 3. miesiąca życia - aplikować 1-2 krople do każdego ucha przed kąpielą lub pływaniem, po kąpeli ostrożnie wytrzeć uszy.

Zapobieganie zatrzymywania się wody w uchu pływaków w wieku powyżej 12 lat i starszych - aplikować 2-3 krople do każdego ucha przed kąpielą lub pływaniem, a po kąpeli ostrożnie wytrzeć uszy.

Ostrzeżenia

Produkt przeznaczony do zastosowania zewnętrznego. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Nie wkładać aplikatora zbyt głęboko do zewnętrznego przewodu słuchowego. W przypadku dzieci i niemowląt produkt powinna aplikować osoba dorosła. Po każdym zastosowaniu zaleca się wypłukanie szklanej pipety pod ciepłą bieżącą wodą i delikatne wysuszenie. Nie stosować do oczu, nosa ani ust. Nie przekraczać zalecanej dawki. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie nadaje się dla niemowląt poniżej 3. miesiąca. Jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ze względów higienicznych zalecamy używanie produktu tylko przez jedną osobę. Stosować krótkoterminowo, maksymalnie do 30 dni.

Nie stosować w przypadku bólu ucha, perforacji błony bębenkowej, w przewlekłych stanach zapalnych ucha środkowego i przewodu słuchowego. Jeśli woskowina uszna rozpuści się i problemy ze słuchem nie ustąpią po 5 dniach stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować do kanału słuchowego jednocześnie z innym produktem do stosowania miejscowego.

Skład

Olea Europaea Fruit Oil, Helianthus Annus Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Glyceryl Undecylenate.