



Remo-Wax Spray 10ml



Cena: 17,75 zł

Opis słownikowy

Producent	ORION PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Aerazol

Opakowanie

Pojemnik 10ml

Działanie

Aerazol **Remo-Wax** usuwa woskowinę uszną. Preparat rozpuszcza korek woskowiny i zapobiega jego powstawaniu.

Wskazania


Higiena uszu.

Sposób użycia

Zawartość butelki ogrzać do temperatury ciała (około 37) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.

W przypadku użycia aerozolu po raz pierwszy, w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia preparatu należy 3-5 razy rozpylić aerazol w powietrzu lub w chusteczkę. Należy upewnić się aby nie uwalniać aerozolu w swoim kierunku. Jeżeli preparat nie jest używany przez jakiś czas, należy się upewnić, że jest on prawidłowo rozpylany poprzez 1-2 krotne naciśnięcie rozpylacza.

Delikatnie pociągnąć górną część ucha do góry i do tyłu. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, wprowadzić końcówkę dyszy do ujścia

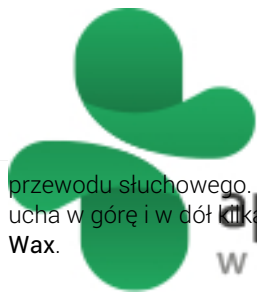

przewodu słuchowego. Należy rozpylić 2 do 3 razy preparat **Remo-Wax** spray do przewodu słuchowego. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały wacik z bawełny zwilżony preparatem **Remo-Wax**.

Pozostawić **Remo-Wax** spray w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby, roztwór można pozostawić w uchu na noc.

Po zastosowaniu należy zdjąć końcówkę dyszy, umyć ją wodą z mydłem, dokładnie wypłukać, ususzyć i ponownie umieścić na miejscu. **Nie należy stosować aerozolu bez założonej końcówki dyszy.**

Po użyciu aerozolu **Remo-Wax** spray należy przepłukać przewód słuchowy. W celu przepłukania uszu można użyć irygatora np. gruszki lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się, aby przepłukanie uszu u dzieci było wykonane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki

- Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
- Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
- Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do kanału słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i bez pośpiechu ściskając gruszkę.

Nie należy wprowadzać końcówki gruszki w głąb przewodu słuchowego.

- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i wycisnąć do pusta w celu usunięcia zawartości. Należy pozostawić gruszkę, kierując końcówkę gruszki do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć.

Skład

Alantoina, lanolina etoksylowana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetylenowy-oleinowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z otrębów Oryza Sativa (ryż), alkohol fenyletylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetoniowy, woda.