




# Stabilizator stawu łokciowego (rozmiar uniwersalny) 1 szt. SALVI ORTOPEDIC

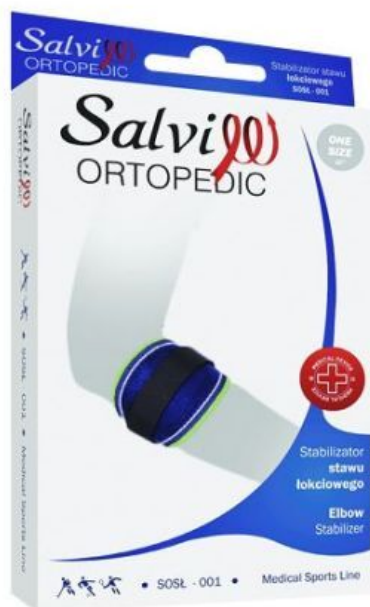

Cena: 34,17 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Stabilizator stawu łokciowego
Producent	PMT
Rejestracja	

## Opis produktu

### Postać

Stabilizator stawu łokciowego

### Opakowanie

1 szt.

### Działanie

Stabilizator przynosi ulgę w stanach zapalnych i bólowych w obrębie stawu łokciowego, przy zwyrodnieniach oraz przeciążeniach. Wyrób zabezpiecza mięśnie, stanowi wsparcie dla ścięgien oraz pomaga w niestabilności stawu. Stabilizator sprawdza się również podczas rehabilitacji oraz w profilaktyce.

### Wskazania

Stabilizator wskazany jest:

- w stanach zapalnych nadkłykcia bocznego kości ramiennej, w celu zabezpieczenia mięśni łokcia,
- przy schorzeniu „łokcia tenisisty” i „golfisty”,
- w stanach zapalnych i bólowych stawu łokciowego, spowodowanych przebytymi urazami lub zwyrodnieniami,



- profilaktycznie w sportach obciążających staw łokciowy.

#### Sposób użycia

- Należy upewnić się, że rozmiar produktu jest odpowiedni.
- Rozpiąć rzep.
- Nałożyć stabilizator na rękę dopasowując ułożenie.
- Docisnąć i zapiąć rzep.

#### Ostrzeżenia

Wyrób medyczny jest przeznaczony do użytku indywidualnego. Produkt nie powinien być używany do innych celów lub w połączeniu z innymi produktami. Po założeniu, należy upewnić się, że stabilizator nie blokuje przepływu krwi. Nie należy zapinać rzepów zbyt mocno. W przypadku dyskomfortu, mrowienia, drętwienia itp. należy poluzować rzepy lub zdjąć ortezę. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy sprawdzić skład materiałów z jakich wykonany jest wyrób. W przypadku wystąpienia uczulenia, należy zdjąć stabilizator, a skórę przemyć wodą. Dalsze stosowanie należy skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować na otwarte rany oraz uszkodzoną skórę. Produkt można zakładać na odzież. Stosowanie produktów wykonanych z neoprenu nie powinno przekraczać 4 godzin.

#### Instrukcja prania

- Rzepy należy spiąć razem.
- Prać ręcznie w temperaturze 30°C.
- Suszyć płasko na ręczniku.
- Nie wykręcać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować.
- Przed kolejnym użyciem, należy upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Materiały termoplastyczne należy czyścić wilgotną ściereczką, wytrzeć do sucha.

#### Przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Należy chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem ciepła oraz światła słonecznego.

#### Skład

Panel neoprenowy: górna i dolna tkanina: 100% poliester, tkanina wewnętrzna: 100% neopren. Rodzaj materiału: 40% nylon, 30% poliester, 25% neopren, 5% elastan.