

Accu Sperm Test płodności określający stężenie plemników

Cena: 43,93 zł



Opis słownikowy

Producent	BIOVENA PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Test diagnostyczny


Opakowanie

- Test płytkowy - 1 szt.
- Kubek na nasienie - 1 szt.
- Butelka roztworu buforowego - 1 szt.
- Plastikowa strzykawka do przenoszenia nasienia - 1 szt.
- Ulotka

Działanie

Test **AccuSperm** pozwala określić czy stężenie plemników jest prawidłowe tzn. czy mieści się w ramach aktualnej wartości referencyjnej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (tj. >15 mln plemników/ml nasienia). Pozytywny wynik testu pokazuje, że stężenie plemników mieści się w przedziale uznanym za prawidłowy, podczas gdy wynik negatywny wskazuje stężenie plemników poniżej normy.

Wynik negatywny może oznaczać niepłodność i stanowić ewentualne wskazanie do dalszej diagnostyki. Negatywny wynik testu nie oznacza, że ciąża nie może wystąpić i nie powinno to być przyczyną unikania stosowania antykoncepcji.

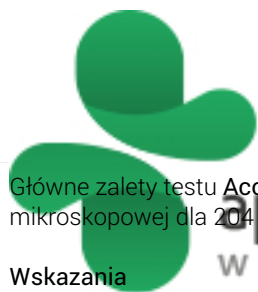

apteka
w sieci

Główne zalety testu **AccuSperm** to łatwość i szybkość wykonania oraz dokładność wyników. Porównanie testu **AccuSperm** i metody mikroskopowej dla 204 próbek klinicznych pokazało, że wskaźnik zgodności dla wyników pozytywnych wyniósł 97,95%.

Wskazania

Badanie płodności u mężczyzn.

Sposób użycia

Najlepszy czas do wykonania testu to od 2 do 7 dni od ostatniego wytrysku. Pobranie nasienia w czasie krótszym niż 2 dni lub dłuższym niż 7 dni wpływa na dokładność wyników badania. Szczegółowa instrukcja wykonania testu znajduje się na ulotce.