



ACERIN plastry na odciski x 6 szt.



Cena: 7,44 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------|
| Producent | AFLOFARM |
| Rejestracja | Opatrunek |

Opis produktu

Postać

Plastry (rozmiar 72 x 19mm)

Opakowanie

6 szt.

Działanie

Plastry **ACERIN** posiadają centralny dysk wykonany z pianki polietylowej, który zabezpiecza odcisk przed ocieraniem i uciskiem. Plastry działają wygładzająco i ochronnie oraz zmiękczają skórę, umożliwiając szybkie i bezbolesne usunięcie nagniotka.

Wskazania

Ochrona i wspomaganie leczenia nagniotków (odcisków).

Sposób użycia

Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie oczyścić i osuszyć leczony obszar, w celu zapewnienia jak najlepszego przylegania i działania plastra. Zdjąć ochronne zabezpieczenie i umieścić plaster tak, aby znalazł się centralnie pod nim. Należy codziennie zmieniać plaster na nowy.

Ostrzeżenia



Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego, do leczenia odcisków. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować w przypadku zaczerwienienia, objawów zapalenia lub zranienia skóry. Jeśli wystąpi uczulenie lub podrażnienie natychmiast przerwać leczenie. Pacjenci z cukrzycą i/lub problemami z krążeniem krwi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz dzieci do 16. roku życia przed zastosowaniem plastrów powinny skonsultować się z lekarzem. Produkt zawiera 35-40% kwasu salicylowego. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż przez 2 tygodnie.