




# AKUKU Termofor z pestkami wiśni

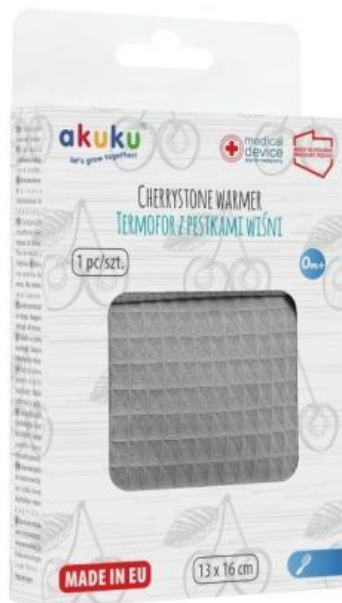

Cena: 19,85 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Producent	ALBIS MAZUR SP. Z O.O.
Rejestracja	Artykuł dziecięcy

## Opis produktu

### Postać

Termofor (13 x 16 cm)

### Opakowanie

1 szt.

### Opis

Termofor z pestkami **AKUKU** to 100% bezpieczny, przyjazny dla dziecka wyrób medyczny. Termofor po podgrzaniu utrzymuje temperaturę do 1 godziny oraz naturalnie oddaje ciepło, dzięki czemu niweluje ryzyko poparzenia i uszkodzenia skóry.

### Wskazania

Stosowanie termoforu na gorąco:

- rwa kulszowa,
- bóle mięśni,
- bóle menstruacyjne,
- kolki noworodkowe, wzdęcia.



Stosowanie termoforu na zimno:

- gorączka,
- ukąszenia owadów,
- migreny,
- siniaki, guzy.

#### Sposób użycia

**Podgrzewanie:** Termofor umieścić w kuchence mikrofalowej (600 W / około 90 sekund), piekarniku (130° / około 10 min.) lub na innym źródle ciepła np. grzejnik. NIGDY NIE GRZAĆ WKŁADU Z POKROWCEM. UWAGA - nie stosować rozgrzanego termoforu na choroby serca, żył, ostrych stanów zapalnych. Po nagrzaniu się termoforu wymieszać pestki i sprawdzić temperaturę na nadgarstku.

**Chłodzenie:** Termofor włożyć z pokrowcem do zamrażalnika na około 60 min lub do lodówki na około 2 godziny. Termofor zabezpieczyć przed kontaktem z żywnością. Pokrowiec można prać ręcznie, lub w pralce w temp 30°. NIGDY NIE PRAĆ WKŁADU Z PESTKAMI.

#### Uwagi

Produkt nie jest zabawką - zawiera małe elementy, które dziecko może połknąć. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń. W przypadku zużycia/zabrudzenia wkładu wymienić go na nowy.