



# Anty-Kleszcz przyrząd do usuwania kleszczy 1 szt

Cena: 9,57 zł

## Opis słownikowy

Producent	Nieznany producent
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Przyrząd w formie strzykawki z zaworem zsącym

### Opakowanie

1 sztuka

### Działanie

Nadaje się do odessania (aspiracji) jadu owadów (komarów, os, pszczoł, szerszeni, itp.) oraz żmij i skorpionów. Ponadto służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka. Jest urządzeniem działającym na zasadzie pompki odsysającej. Powstała w urządzeniu próżnia odsysa całego kleszcza z ciała, nie pozostawiając żadnych fragmentów. Dzięki gumowej uszczelce skuteczność pompki zapewniona jest na długi czas. Przyrząd doskonale nadaje się do udzielania pierwszej pomocy.

### Wskazania

Przyrząd doskonale nadaje się do udzielania pierwszej pomocy. Skuteczny i łatwy do usuwania kleszczy.

### Sposób stosowania

- W celu przygotowania przyrządu do użycia - wcisnąć gumowy tłok do oporu.
- Przyłożyć końcówkę do ciała w miejscu wprowadzenia jadu lub wczepienia się kleszcza.
- Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymywać, wyciągając powoli tłok do odpowiedniej pozycji.
- Miejsce ukąszenia powinno znajdować się w centralnym położeniu końcówki.
- Przytrzymać przyrząd w tej pozycji około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórzyć zabieg.
- Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi.
- Końcówkę przyrządu przemyć wodą z mydłem, zdezynfekować środkiem odkażającym.

### UWAGA!

Usunięcie kleszcza może być utrudnione w przypadku wczepienia się kleszcza w miejscach uniemożliwiających wytworzenie próżni, np. we włosach, na zgięciach, w zagłębieniach.

### Przeciwwskazania



Nie używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu, zewnętrznych narządów płciowych. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

apteka  
w sieci