

Aparat korekcyjny MARCIN II (na dzień) 1 op

Cena: 17,65 zł



Opis słownikowy

Producent	Nieznany producent
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Aparat na haluksy

Opakowanie

1 op 2 szt

Skład

W opakowaniu znajdują się 2 sztuki klinów oraz 2 kołeczki. Rozmiar: uniwersalny.

Działanie

Aparat używany jest w trakcie chodzenia. Do aparatu - jako jedyne z grupy klinów międzypalcowych - dołączono kołeczki rozporowe, stosowane w zależności od rozległości wady.

Wskazania

Aparat stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu palucha koślawego (Hallux Valgus).

Sposób użycia

Po umyciu stóp i przeprowadzeniu gimnastyki, zakładamy aparat na stopy. Aparat należy umieścić między I a II palcem stopy, otworami do góry i węższą częścią do wnętrza stopy. Do aparatu dołączone są kołeczki, które umieszczając w otworach stosuje się w zależności

