



# APTEO STOPERY przeciwhałasowe piankowe, jednorazowe 2 szt.

Cena: 2,70 zł



## Opis słownikowy

Producent	SYNOPTIS PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Tłumiki hałasu piankowe

### Opakowanie


1 para (2 szt.)

### Opis

Przeciwhałasowe piankowe stopery posiadają stożkowy kształt, dzięki czemu dopasowują się do większości kanałów słuchowych. Wykazują wysoką wydajność szumów, zapewniają długotrwały komfort użytkowania i pewne działanie.

### Sposób użycia

- Wkładkę zrolować palcami, aby ukształtować wałeczek bez zagnieceń.
- Dla zapewnienia prawidłowego ułożenia wkładki, wyciągnąć rękę nad głowę i delikatnie odciągnij ucho do góry i na zewnątrz. Umieścić zrolowaną wkładkę w kanale słuchowym.
- Przytrzymać koniec wkładki przy uchu do momentu jej pełnego rozkurczenia. Jeśli wkładka jest umieszczona prawidłowo, tylko jej koniec powinien być wyczuwalny. Jeśli większość wkładki znajduje się poza kanałem słuchowym, wyjąć ją i ponownie dopasować.

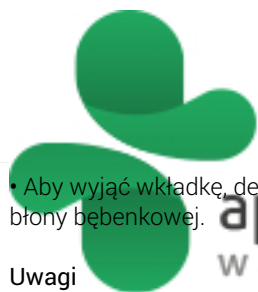

• Aby wyjąć wkładkę, delikatnie ją przekręć i powoli wyciągnąć z przewodu słuchowego, tak aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu błony bębenkowej.

#### Uwagi

Produkt jest nietoksyczny. Połknięcie wkładki grozi zadławieniem. Niewłaściwe dopasowanie wkładki zmniejsza skuteczność jej działania i może spowodować utratę słuchu lub inne obrażenia.

#### Przechowywanie

Przechowywać z dala od niemowląt i małych dzieci. Używać i przechowywać wkładki w temperaturze od -20°C do 35°C. Stoperów nie należy wkładać zbyt głęboko do kanału słuchowego, ponieważ trudno będzie je wyjąć.