



Aqua Gel opatrunek żelowy 6.5cm, 1 szt

Cena: 4,73 zł



Opis słownikowy

Producent	KIKGEL
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Opatrunek żelowy

Opakowanie

1 szt średnica 6.5 cm

Działanie

Aqua-gel to opatrunek zapewniający wilgotne środowisko na powierzchni rany, wspomaga przez to oczyszczanie z martwych komórek. Opatrunek pochłania wysięk z rany, a jednocześnie umożliwia "oddychanie" rany. Aqua-gel jest sterylny, przezroczysty, elastyczny i wytrzymały. Opatrunek stanowi elastyczny płat hydrożelu o grubości 4mm.

Wskazania

Aqua-gel polecany jest do użytku na oparzenia, owrzodzenia podudzi, rany przewlekłe np. stopa cukrzycowa, otarcia, uszkodzenia naskórka po zabiegach dermatokosmetycznych lub powierzchniowe odleżyny.

Sposób użycia

Opatrunek należy umieścić dowolną stroną na powierzchni rany. Należy stosować opatrunek odpowiadający wielkości rany. Aqua-gel należy zabezpieczyć przylepcem włókninowym.

Przeciwwskazania



Produkt nie jest wskazany dla ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z treścią ropną, z dużą ilością wysięku.