



Aqua-Gel opatrunek żelowy 6,5cm x 1 szt.

Cena: 5,69 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	5 dni
Producent	KIKGEL
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Opatrunek żelowy

Opakowanie

1 szt. średnicy 6,5 cm


Działanie

Aqua-Gel zapewnia wilgotne środowisko na powierzchni rany, co wspomaga oczyszczanie autolityczne z martwych komórek oraz wpływa na procesy ziarninowania i naskórkowania rany. Ma właściwości adsorpcyjne, pochłania wysięk z rany. Unikalna struktura stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz, jednocześnie umożliwia „oddychanie” rany. Są sterylne, przezroczyste, elastyczne oraz odpowiednio wytrzymałe mechanicznie. Formę użytkową opatrunku stanowi przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm.

Wskazania

Opatrunek stosuje się na oparzenia, owrzodzenia podudzi, powierzchowne odleżyny, inne rany przewlekłych np. stopa cukrzycowa, Epidermolysis Bullosa, otarcia i inne uszkodzenia naskórka np. po zabiegach dermatokosmetycznych.

Sposób użycia

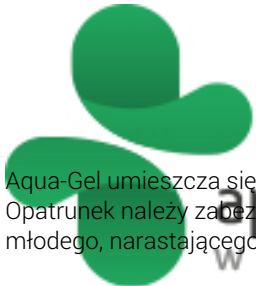

Aqua-Gel umieszcza się dowolną stroną na powierzchni rany. Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany. Opatrunek należy zabezpieczyć przytępcem włókninowym. Zmiana opatrunku jest łagodna i bezbolesna dla pacjenta, nie uszkadza młodego, narastającego naskórka. Wraz ze zmienianym opatrunkiem z rany usuwane są wydzieliny oraz martwe tkanki.

Przeciwwskazania

Nie jest zalecany w przypadku ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z dużą ilością wysięku, z treścią ropną.