



apteka
w sieci

Aspirator kataru SMARKACZ

Cena: 21,99 zł



Opis słownikowy

Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Aspirator

Opakowanie

- Mięka silikonowa końcówka
- Pojemnik do zbierania próbek
- Filtr higieniczny - 3 szt.
- Wężyk
- Łącznik wężyka
- Adapter do odkurzacza
- Woreczek do przechowywania

Opis

Aspirator kataru „SMARKACZ” usuwa wydzielinę z noska dziecka, zapewniając swobodne oddychanie. Regularne czyszczenie nosa pozwala przeciwdziałać lub ograniczać infekcje górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych), jak również pomaga leczyć schodzenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, oskrzeli, tchawicy i płuc).



Sposób użycia

apteka

W przypadku gdy wydzielina z nosa jest zbyt twarda lub sucha, należy zmiękczyć wydzielinę za pomocą izotonicznego roztworu soli fizjologicznej, sprayu lub kropli. W przypadku wątpliwości lub niepewności należy skontaktować się z lekarzem pediatrą,

1. Nowy lub oczyszczona filtr do łącznika węża.
2. Podłączyć łącznik węża do pojemnika do zbierania próbek i końcówki silikonowej.
3. Umieścić wąż na uchwycie węża pojemnika zbiorczego.
4. Włożyć adapter odkurzacza do końcówki węża i podłączyć urządzenie do odkurzacza. Włączyć odkurzacz na najniższej mocy i przyłożyć miękką silikonową końcówkę do nozdrza dziecka.
5. Włączyć odkurzacz na najniższej mocy i przyłożyć miękką silikonową końcówkę do nozdrza!

Uwagi: Aspirator umieścić blisko otworu nosowego. Nie należy wkładać końcówki do nozdrza!

6. Odciągać wielokrotnie przez kilka sekund, aż wydzielina z nosa znajdzie się w pojemniku na wydzielinę. Powtórzyć cały proces w drugim nozdrzu.
7. W razie potrzeby można odłączyć urządzenie i wymienić filtr.

Filtry zapobiegają przenoszeniu bakterii i można je myć. Górna część jest zaprojektowana tak, aby nie uszkodzić błony śluzowej nosa.

Ostrzeżenia

Nie stosować aspiratora do nosa w przypadku krwawień z nosa lub ran w nozdrzach. Nie używać do ust lub uszu. Produkt nie jest zabawką, należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać dzieci bez opieki z aspiratorem. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe po przeczytaniu instrukcji. Przed użyciem upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo połączone. W przypadku braku dokładnego i odpowiedniego oczyszczenia części urządzenia przed użyciem istnieje ryzyko rozwoju bakterii i pleśni.