



AVILIN Spray opatrunek adhezyjny 90 ml



Cena: 30,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	90 ml
Postać	spray
Producent	NES PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Spray

Opakowanie

90ml

Działanie

Wyrób medyczny **AVILIN Spray** tworzy ochronną barierę na uszkodzonej skórze, przeciwdziałając przyleganiu opatrunku. Preparat zabezpiecza ranę przed środowiskiem zewnętrznym i przyspiesza gojenie się rany poprzez wspomaganie procesu ziarninowania i epitelializacji.

Właściwości fizyko-chemiczne wyrobu medycznego i jego wysoka lepkość sprawia, że **AVILIN Spray** utrzymuje się na uszkodzonej skórze, skutecznie zabezpieczając ranę przed czynnikami zewnętrznymi. Produkt chroni przed utratą wody przez ranę, zapewniając jej optymalną wilgotność. Dodatkowo, wyrób medyczny umożliwia utrzymanie właściwego pH rany wymianę gazową.

Wskazania

- Opatrunek adhezyjny może być stosowany na:
- owrzodzenia żylakowate goleni,
- zespół stopy cukrzycowej,



- rany niedokrwienia (najczęściej pochodzenia miażdżycowego),
- odleżyny (owrzodzenia troficzne),
- rany oparzeniowe (pochodzenia termicznego, chemicznego i elektrycznego),
- inne rany.

Sposób użycia

Sterylny wyrób medyczny należy aplikować na ranę z odległości 10-15 cm, pokrywając całą jej powierzchnię, jeden raz dziennie. Po aplikacji należy zabezpieczyć ranę jałową gazą. Po użyciu produktu opakowanie zamknąć ponownie zatyczką plastikową.

Uwaga: przed użyciem należy oczyścić dyszę poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka.

Przeciwwskazania

- rany z silnym krwawieniem,
- rany z dużą ilością wysięku,
- rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy,
- rany z treścią ropną,
- rany z cechami zakażenia,
- uczulenie na składniki preparatu.

W wymienionych przypadkach stosowanie opatrunku adhezyjnego Avilin Spray należy skonsultować ze specjalistą

Skład

Polimer E (eter poliwinyllobutylowy).