



BOBO-TEST Test ciążowy płytkowy x 1 szt.



Cena: 9,90 zł

Opis słownikowy

Producent	DIAGNOSIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Test ciążowy płytkowy

Opakowanie

Płytko testowa, pipetka, instrukcja obsługi

Opis

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest hormonem wytwarzanym przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnieniu i jest wydalany w moczu. Test ciążowy zawiera przeciwciała, które w swoisty sposób reagują z tym hormonem. Bobo Test wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu hCG co może stwierdzić ciążę lub jej brak. Bobo Test jest wyjątkowo czuły i jest w stanie wykryć obecność hCG już przy stężeniu 25 mIU/ml.

W momencie zakroplenia próbki moczu do miejsca na próbkę moczu na płytce testowej, działanie kapilarne powoduje przemieszczenie próbki przez membranę. Z chwilą gdy hCG w próbce dotrze do obszaru membrany, w którym zachodzi reakcja, pojawi się kolorowa linia. Brak obecności kolorowej linii w obszarze testowym (T) wskazuje na negatywny wynik testu. W ramach procedury kontrolnej, jeżeli test został przeprowadzony prawidłowo, w strefie kontrolnej testu (C) pojawi się kolorowa linia.

Wskazania

Samodzielne wykonanie testu ciążowego.

Sposób użycia



BOBO-TEST to szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku. Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu. Test można stosować już po 10 dniach po stosunku. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

- Zanim przeprowadzi się test należy zebrać próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku.
- Wyjąć foliową torebkę z opakowania testu.
- Rozerwać torebkę wzdłuż nacięcia i wyjąć płytkę testową i pipetkę.
- Zanurzyć końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu.
- Ściskając szeroką część pipetki nabrać próbkę moczu.
- Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem SAMPLE (S) umieścić w nim 3-4 krople moczu. Należy uważać, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza.
- Po 3-5 minutach odczytać wynik, a następnie wyrzucić test.

UWAGA: Jeżeli w oknie testowym pojawia się tylko linia kontrolna C (brak ciąży), to po okresie dłuższym niż 5 minut nie należy odczytywać wyniku, ponieważ w teście nadal zachodzą reakcje chemiczne, które mogą zmienić obraz przeprowadzonego testu.

Ostrzeżenia

- Nie otwierać foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
- Nie używaj testu jeżeli minęła data jego przydatności do użycia (data przydatności jest wydrukowana na opakowaniu i etykiecie).
- Test wyłącznie do diagnostyki in vitro (stosować tylko do użytku zewnętrznego). NIE POŁYKAĆ.
- Test należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C, z dala od światła słonecznego.
- Nie wolno zamrażać testu.
- Jeżeli nie możesz wykonać testu tuż po pobraniu próbki moczu, możesz próbkę przechować przez 3 dni w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce). Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać ok. pół godziny w temperaturze pokojowej.
- Test należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Test może być używany tylko raz. Wyrzucić po użyciu.
- Nie wykonuj testu, jeżeli torebka foliowa jest dziurawa lub nie jest szczelnie zamknięta.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.