



apteka
w sieci

Conceive Plus Lubrykant wspomagający zapłodnienie, aplikatory 8 x 4g



Cena: 78,93 zł

Opis słownikowy

Producent	HYDREX
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Lubrykant

Opakowanie

Aplikatory 8 szt. po 5g

Działanie

Conceive Plus jest osobistym lubrykaniem przeznaczony dla par starających się o zajście w ciążę. Stosowany dopochwowo lub na powierzchnię penisa, zapewnia nawilżenie i lubrykację, zwiększając łatwość i komfort podczas stosunku seksualnego.

Produkt posiada **unikalną formułę**, wzbogaconą w jony wapnia i magnezu, które pomagają **zwiększyć żywotność oraz ruchliwość plemników**. Preparat **Conceive Plus** posiada zrównoważone i izotoniczne pH naśladujące płodny śluz kobiety, dzięki czemu wspiera naturalne zapłodnienie.

Produkt może być również stosowany w badaniu płodności, poprzez ułatwienie wprowadzenia instrumentów diagnostycznych i terapeutycznych do pochwy. Lubrykant **Conceive Plus** dobrze współgra z prezerwatywami z naturalnego lateksu i poliuteranu.

Wskazania

Wspomaganie zapłodnienia. Nawilżenie i lubrykacja w celu zwiększenia łatwości i komfortu podczas stosunku.



Sposób użycia

apteka
w sieci

Należy zawsze przeczytać ulotkę, stosować produkt zgodnie z jej zaleceniami.

Aplikator wyjąć z pudełka. Przytrzymać wąski koniec aplikatora skierowany do góry i odkręcić zatyczkę. W delikatny sposób włożyć wąską końcówkę aplikatora głęboko do pochwy i 2-3 razy nacisnąć aplikator, aby rozprowadzić lubrykant w jamie pochwy. Wyjąć aplikator wciąż go ściskając, a następnie wyrzucić.

Można nakładać do 15 minut przed stosunkiem seksualnym, aby lubrykant pokrył pochwę i szyjkę macicy. W celu uzyskania dodatkowego nawilżenia, można użyć tubki wielokrotnego użytku lub innego aplikatora.

Zastosowanie kliniczne

Preparat **Conceive Plus** może być także stosowany do nawilżenia tkanek pochwy w celu ułatwienia wprowadzenia instrumentów diagnostycznych lub terapeutycznych do jamy pochwy.

Odpowiednią ilość lubrykantu nałożyć na powierzchnię instrumentu i/lub narządów płciowych przed wprowadzeniem.

Ten produkt nie jest jałowy i nie powinien być używany, gdy wymagany jest sterylny produkt. Aplikatory są przeznaczone do jednorazowego użytku - nie przechowywać po otwarciu ani nie używać ponownie.

Uwagi

Lubrykant **Conceive Plus** nie jest środkiem antykoncepcyjnym, nie zabija plemników i nie wpływa na ich funkcje. Nie stosować jeśli naklejka potwierdzająca szczelność jest uszkodzona lub nieobecna. W przypadku wystąpienia podrażnień, przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem, jeśli będzie się ono utrzymywać.

Jeśli pacjentka nie zaszła w ciążę po 6 miesiącach stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem. Ten produkt nie jest przeznaczony do zabiegów inseminacji domowej.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie używać po upływie terminu ważności. Przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C w oryginalnym opakowaniu.

Skład

Woda, hydromeloza, fosforan sodu, diwodofosforan sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia, glicerol, metyloparaben.