



Corega Podwójna Siła tabletki x 36 szt.



Cena: 12,22 zł

Opis słownikowy

Producent	STAFFORD-MILLER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki oczyszczające do protez

Opakowanie

36 tabletek

Działanie

Corega Podwójna Siła pozwala na szybkie i silne czyszczenie protezy zębowej, dzięki nowej formule, która pozwala na uwalnianie 2x większej ilości składników oczyszczających. Tabletki niszczą 99,99% bakterii, będących przyczyną przykrego zapachu. W jedynie kilka minut usuwają przebarwienia i redukują płytkę bakteryjną. Mimo swojej siły są wyjątkowo delikatne, co pozwala na ich codzienne używanie.

Wskazania

Czyszczenie protez zębowych, przebarwienia, przykry zapach

Sposób użycia

- Wrzucić tabletkę Corega do naczynia z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można w niej było całkowicie zanurzyć protezę.
- Włożyć protezę do roztworu i pozostawić na przynajmniej 5 minut, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką. Pozostały roztwór należy wylać.



• Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenia

apteka
w sieci

Nie umieszczать tabletek, roztworu w jamie ustnej. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku poknięcia należy skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

Produkt podrażnia oczy. Po kontakcie z tabletką lub jej roztworem należy dokładnie umyć ręce. W razie dostania się do oczu: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Jeżeli są i można, należy usunąć szkła kontaktowe i wciąż płukać. W przypadku braku poprawy potrzebna jest porada lub pomoc lekarza. Produkt zawiera olejek mięty pieprzowej. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Skład

Sodium bicarbonate, Sodium carbonate peroxide, citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium carbanate, TAED, Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, Aroma, Cellulose gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140