

COREGA POWER MAX Mocowanie + Komfort krem mocujący do protez, neutralny smak 40g

Cena: 18,37 zł

Opis słownikowy

Producent	STAFFORD-MILLER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny



Opis produktu

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 40g

Działanie


Krem **COREGA MAX MOCOWANIE + KOMFORT** zapewnia najsilniejsze mocowanie protezy zębowej, zmniejszając równocześnie jej nacisk. Nie zawiera sztucznych barwników ani aromatów i posiada neutralny smak. Preparat wykazuje długotrwałe działanie (nawet do 12 godzin), a jego tubka posiada precyzyjny aplikator umożliwia precyzyjne jego nakładanie.

Wskazania

Mocowanie protezy.

Sposób użycia

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby następnym razem należy nałożyć większą ilość kremu. Użycie zbyt dużej ilości kremu może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji należy następnym razem zastosować mniejszą ilość kremu. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego mocowania i osłony dla przedostających się drobinek.

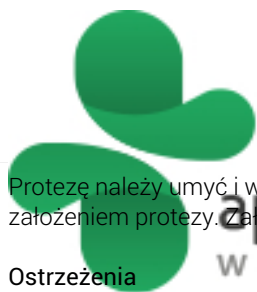

Protezę należy umyć i wysuszyć. Nanosić krótkie paski kremu na protezę niezbyt nisko jej krawędzi. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego mocowania.

Ostrzeżenia

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności).

Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe. Niewłaściwe dopasowanie protezy może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Skład

Guma celulozowa, wazelina, parafina płynna, kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, karbomer.