



apteka  
w sieci

# COREGA Super Mocny krem mocujący do protez, delikatnie miętowy 40 g

Cena: 18,78 zł



## Opis słownikowy

Producent	STAFFORD
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Krem

### Opakowanie

Tubka 40g

### Skład

calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430.

### Działanie


Krem zapewnia trwałe mocowanie protezy przez okres całego dnia oraz zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę.

### Wskazania

Mocowanie protezy

### Sposób użycia

Sposób aplikacji kremu

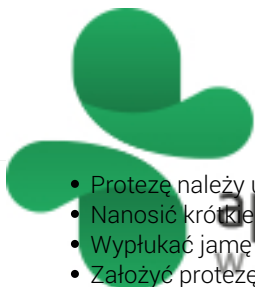

- Protezę należy umyć i wysuszyć
- Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.
- Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy
- Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

#### Sposób usuwania

- Przepłukać jamę ustną
- Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią nie poruszając
- Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki
- Dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Cerega, a następnie opłukać wodą

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby użyć większej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować wypływanie kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia ilości kremu dla dane protezy. Stosować raz dziennie. Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem dentystą.

#### **Ostrzeżenia**

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu - nie jest to szkodliwe. Niewłaściwe dopasowanie protezy może mieć negatywny wpływ na zdrowie.