

# Corega Tabs Bio Formuła 1 tabletka rozpuszczalna

Cena: 0,40 zł



## Opis słownikowy

Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Tabletki do czyszczenia protez

### Opakowanie

1 tabletka

### Skład

Sodium bicarbonate, citric acid, potassium caroate, sodium carbonate, sodium carbonate peroxide, taed (tetra acetyl ethylene diamine), sodium benzoate, peg-180, sodium lauryl sulfoacetate, pvp/va copolymer, aroma, ci 4090, ci 73015, ci 19140.

### Działanie

Preparat służy do codziennej higieny i czyszczenia protez zębowych. Skutecznie czyści nawet najbardziej niedostępne miejsca protezy, działa antybakteryjnie, ochrania dziąsła przed infekcją, zapobiega przykremu zapachowi z ust, pozostawia uczucie świeżości i czystości. Zabija 99,9% bakterii, które są główną przyczyną nieświeżego oddechu, usuwa osad oraz przebarwienia odświeża protezę. Można stosować do protez całkowitych jak częściowych. Pomagają również chronić protezę przed przebarwieniami z kawy czy herbaty. Dzięki delikatnej formule czyszczą bez rysowania powierzchni.

### Wskazania

Czyszczenie protez zębowych, osad, bakterie, przebarwienia, przykry zapach.



### Sposób użycia

apteka

Tabletkę rozpuszcza się w szklance ciepłej wody, następnie należy włożyć do niej protezę tak, by była całkowicie zanurzona. Pozostawić przez 15 minut. (Można też przechowywać protezę w ten sposób przez całą noc.). Po wyjściu dokładnie opłukać.

### Przeciwwskazania:

Tabletek COREGA TABS nie należy spożywać ani wkładać do jamy ustnej. Roztworu COREGA nie należy połykać ani stosować do płukania jamy ustnej. Unikać kontaktu tabletek z oczami i jamą ustną. Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

### Działania niepożądane:

Szkodliwy w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.