



Corega Tabs Bio Formula tabletki rozpuszczalna x 1 szt.



Cena: 0,18 zł

Opis słownikowy

Producent	STAFFORD-MILLER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletka

Opakowanie

1 szt.

Opis

Tabletki **Corega Tabs** posiadają formułę **MicroClean** o działaniu trójfazowym:

- pomagają usuwać nieprzyjemny zapach,
- czyści nie uszkadzając powierzchni,
- usuwa przebarwienia.

Produkt **Corega Tabs** nie zawiera substancji ścierających, efektywnie i delikatnie usuwa bakterie. Tabletki zapobiegają podrażnieniom dziąseł i pozwalają zachować higieniczną świeżość.

Wskazania

Oczyszczanie protez.



Sposób użycia

- Jedną tabletkę wrzucić do ciepłej wody (nie może być gorąca), tak aby cała proteza była w wodzie.
- Sztuczną szczękę wyjąć ze szklanki po 15 minutach i oczyścić miękką szczoteczką.
- Protezę opłukać pod bieżącą wodą, a pozostałość roztworu po płukaniu wylać.

Ostrzeżenia

Pożłknięcie tabletki bądź roztworu jest szkodliwe dla zdrowia. Może wywołać reakcje alergiczne. Po użyciu tabletek należy dokładnie umyć dłonie. Przy kontakcie z oczami opłukać wodą. Jeśli swędzenie oczu będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

Trzymać z dala od dzieci oraz osób, które mogłyby połknąć tabletki bądź wypić roztwór. W przypadku połknięcia jak najszybciej skontaktować się z lekarzem bądź udać się na pogotowie ratunkowe.

Skład

Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, Sodium Carbonate peroxide, TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfoacetate, VP/VA Copolymer, Aroma, Subtilisin, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015.