



apteka
w sieci

COREGA Ultra Haftcreme NEUTRAL krem do protez zębowych, neutralny smak 40 g

Cena: 12,23 zł



Opis słownikowy

Producent	STAFFORD-MILLER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 40g

Działanie

Krem mocujący **COREGA Ultra Haftcreme NEUTRAL** uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię. Produkt nie zawiera aromatów, dzięki czemu podczas jej stosowania można bez przeszkód cieszyć się ulubionymi potrawami. Formuła kremu nie zawiera cynku ani sztucznych barwników.

Wskazania

Mocowanie protez pełnych i częściowych.

Sposób użycia

Krem należy stosować raz dziennie, aplikować małą ilość kremu. Użycie zbyt dużej ilości kremu może powodować jego wypływanie. Tubka kremu powinna wystarczyć na minimum 3 tygodnie stosowania.



Aplikacja kremu mocującego

- › Oczyszczyć i osuszyć protezę.
- › Nałożyć małe paski kremu na protezę, ale nie za blisko jej krawędzi.
- › Wyplukać jamę ustną przed założeniem protezy.
- › Włożyć protezę, mocno docisnąć i gryźć przez kilka sekund, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.
- › Stosować tylko raz dziennie.

Wymywanie protezy zębowej

- › Przepłukać usta wodą.
- › Powoli poluzować protezę "ruchem kołyszącym".
- › Usunąć pozostałości kremu klejącego z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki do zębów.
- › Zaleca się użycie tabletki Corega TABS, aby dokładnie wyczyścić protezę, a następnie dobrze opłukać wodą.

Uwagi

Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nieliczne osoby mogą być uczulone na składniki tego produktu. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zaprzestać stosowania produktu. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników kremu. W przypadku wystąpienia dyskomfortu stosowanie preparatu należy przerwać.

Skład

Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum.