

COREGA Ultra Haftcreme STARKER HALT Krem mocujący do protez Mocne Trzymanie 40g

Cena: 13,14 zł



Opis słownikowy

Producent	STAFFORD-MILLER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 40g

Działanie

Krem COREGA Ultra Haftcreme STARKER HALT zapewnia mocne, całonocne utrzymanie protez zębowych. Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię. Krem zapewnia komfort noszenia protezy.

Wskazania

Mocowanie protez zębowych.

Sposób użycia

Dawkowanie

Stosować raz dziennie, aplikować małą ilość kremu. Użycie zbyt dużej ilości kremu może powodować jego upływanie.



Sposób aplikacji kremu mocującego

Protezę umyć i wysuszyć. Nanieść kilka krótkich (6 mm) pasków kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi. Jamę ustną należy wypłukać przed założeniem protezy. Protezę założyć, docisnąć ją i na kilka sekund przygryźć. Aby końcówka tubki nie zatykała się, nakrętka i końcówka muszą być suche.

Sposób wyjmowania protezy zębowej

Przepłukać jamę ustną. Powoli wyjąć protezę, poruszając ją kołyszącym ruchem. Usunąć resztki kleju mocującego z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki do zębów. W celu dokładnego oczyszczenia protez używać preparatu specjalnie przeznaczonego do tego celu.

Skład

Ca/NA PVM/MA Copolymer - Calcium/sodium (mixed partial salt) Poly (methylvinylether/maleic acid) Copolymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum, Propylparaben, Aroma, CI 73360 (Czerwień trioindygowa), CI 15850 (Czerwień litowa). Nie zawiera cynku.