



apteka
w sieci

Cosmos plastry na otarcia (45 mm x 65 mm) x 4 szt.



Cena: 12,17 zł

Opis słownikowy

Producent	PAUL HARTMANN AG
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Plaster hydrokoloidowe

Opakowanie

4 szt. x 45 mm x 65 mm

Opis

Hydrokoloidowe, sterylne plastry na otarcia, wspomagające proces gojenia i uśmierzające ból. Opatrunki plasterów hydrokoloidowych zawierają warstwę, która pochłania wysięk i zmienia go w żelowo-podobną substancję, zapewniając amortyzację rannego obszaru, a także niweluje ucisk i tarcie.

Wskazania

Plastry wskazane są szczególnie na kolana i łokcie.

Sposób użycia

1. Umyć dłonie i nałożyć plaster wyłącznie na suchą, osuszoną i nienatłuszczoną skórę.
2. Otworzyć papierowe opakowanie i wyjąć plaster.
3. Przed zastosowaniem ogrzać plaster w dłoniach. Usunąć pierwszą folię ochronną i nałożyć odsłoniętą część plastra na otarcie na



4. Delikatnie pociągnąć drugą folię ochronną i założyć resztę plastra. Lekkie przyciśnięcie i wymodelowanie brzegów plastra zapewnia jego optymalne przyleganie do skóry.

5. Maksymalny czas stosowania plastra wynosi 4 dni. Jeśli zamierza się usunąć plaster wcześniej lub w momencie maksymalnego czasu stosowania, należy go na krótko zmożyć ciepłą wodą.