


# Dicloctica thermal uniwersalny plaster rozgrzewający 1 szt.

Cena: 1,89 zł

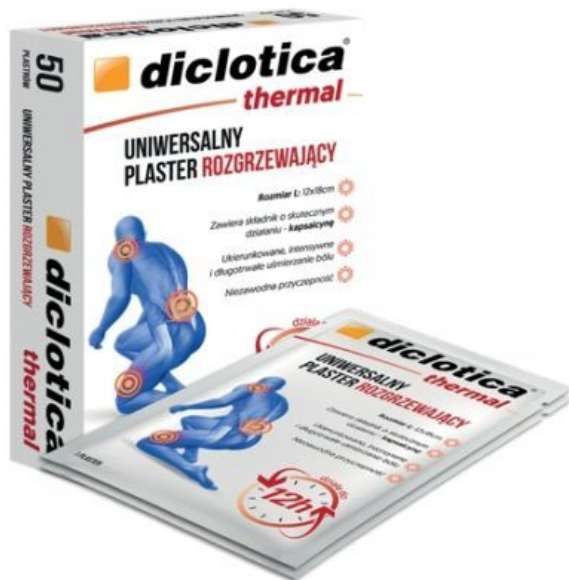

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Plaster

### Opakowanie

1 szt.

### Wskazania

Długotrwałe łagodzenie bólu mięśni, zmęczenia mięśni, lumbago, bólu pleców, sztywność barków i bóli związanych z zapaleniem stawów.

### Sposób użycia

Należy umyć i osuszyć bolące miejsce. Opakowanie rozciąć i wyjąć plaster. W razie potrzeby przyciąć plaster do odpowiedniego rozmiaru. Odkleić papierową warstwę ochronną i przykleić plaster na bolące miejsce, raz lub dwa razy dziennie. Każdy plaster można używać przez 8-12 godzin.

- Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia - nakładać jeden lub dwa plastry na bolące miejsce raz dziennie. Odkleić po 12 godzinach.
- Dorośli z problemami zdrowotnymi i dzieci w wieku od do 12. roku życia - stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.
- Dzieci poniżej 2. roku życia - nie stosować, skonsultować się z lekarzem.



### Ostrzeżenia

Plastra nie należy stosować:

- na rany,
- podrażnioną lub uszkodzoną skórę,
- przez okres dłuższy niż 12 godzin,
- jeśli wygląd produktu uległ zmianie,
- w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na produkt.

### Uwagi

Podczas stosowania wyrobu należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Nie należy mocno owijać bandażem bolącego miejsca. Należy nadzorować używanie wyrobu u dzieci. Zachować ostrożność w przypadku skłonności do reakcji alergicznych.

Należy przerwać używanie wyrobu i skonsultować się z lekarzem, jeśli stan pogarsza się, objawy utrzymują się przez okres dłuższy niż 7 dni, objawy ustąpią i pojawiają się ponownie w ciągu kilku dni, wystąpi nadmierne podrażnienie skóry. Przerwać stosowanie wyrobu w przypadku stosowania w bólu związanym z zapaleniem stawów: ból utrzymuje się dłużej niż 10 dni; występuje zaczerwienieniem; u dzieci poniżej 12. roku życia.

### Skład

Wyciąg z papryki, mentol, salicylan metylu.