



# Dr. Yglo do zwalczania brodawek wirusowych



Cena: 27,55 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	

## Opis produktu

### Postać

Aerazol

### Opakowanie

50ml

### Działanie

Wyrób medyczny **Dr.Yglo** wymraża brodawki punktowo na palcach, dłoniach i stopach. Produkt nie wymaga składania, jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania i wymraża zmiany w zaledwie kilka sekund. **Dr.Yglo** posiada unikalny aplikator z precyzyjną końcówką, która umożliwia skierowanie jej wyłącznie na brodawkę, uniemożliwiając kontakt gazu ze skórą.

### Wskazania

Leczenie zwykłych brodawek i usuwanie brodawek podeszwowych na stopach. Produkt może być stosowany u dzieci powyżej 4. roku życia.

### Sposób użycia

#### Brodawki zwykłe

1. Nałożyć aplikator na pojemnik z aerozolem, metalową końcówką skierowaną do góry. Nie naciskać na aplikator przed pełną gotowością do wymrażania.



- Umieścić pojemnik z aerozolem na twardej powierzchni, nacisnąć i przytrzymać biały aplikator przez 3 sekundy. Następnie pozostawić pojemnik na 5 sekund. Podczas dociskania unikać kontaktu z metalową końcówką.
- Zdjąć aplikator z pojemnika z aerozolem, metalową końcówką skierowaną do góry.
- Przyłożyć końcówkę do brodawki na 20 sekund lub krócej, w zależności od wielkości zmiany. Upewnić się, że metalowa końcówka pokrywa największą część brodawki.
- Natychmiast po użyciu umyć ręce (z wyjątkiem miejsca poddanego działaniu preparatu).
- W przypadku stosowania przez więcej niż jedną osobę i/lub po każdym zastosowaniu należy wyczyścić aplikator materiałem nasączonym alkoholem.

Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcję zawartych w ulotce informacyjnej. Nieostrożne użycie może spowodować zbyt głębokie zamrożenie, powodując trwałe uszkodzenia górnej warstwy skóry na palcach rąk i nóg. Może skutkować trwałymi bliznami lub uszkodzeniem nerwów.

#### Brodawki podeszwowe

- Namoczyć stopę z brodawką przez 5 min. w ciepłej wodzie. Dokładnie wysuszyć. Zetrzeć obszar brodawki podeszwowej pumeksem lub pilnikiem pumekсовym (brak w opakowaniu z preparatem Dr.Yglo) przed aplikowaniem preparatu Dr.Yglo do zwalczania brodawek.
- Nałożyć aplikator na pojemnik z aerozolem, metalową końcówką skierowaną do góry. Nie naciskać na aplikator przed pełną gotowością do wymrażania.
- Umieścić pojemnik z aerozolem na twardej powierzchni, nacisnąć i przytrzymać biały aplikator przez 3 sekundy. Następnie pozostawić pojemnik na 5 sekund. Podczas dociskania unikać kontaktu z metalową końcówką.
- Zdjąć aplikator z pojemnika z aerozolem, metalową końcówką skierowaną do góry.
- Przyłożyć metalową końcówkę do brodawki na 40 sekund. Upewnić się, że metalowa końcówka pokrywa jak największą część brodawki.
- Natychmiast po użyciu umyć ręce (poza obszarem poddanym działaniu preparatu).
- W przypadku stosowania przez więcej niż jedną osobę i/lub po każdym zastosowaniu należy wyczyścić aplikator materiałem nasączonym alkoholem.

Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji zawartych w ulotce informacyjnej. Nieostrożne użycie może powodować zbyt głębokie zamrożenie, powodując trwałe uszkodzenie górnej warstwy skóry na palcach rąk i nóg. Może to skutkować trwałymi bliznami lub uszkodzeniem nerwów. Do ochrony wrażliwego obszaru po zakończeniu leczenia brodawek podeszwowych można zastosować miękkie wkładki do butów (nie zawarte w opakowaniu Dr. Yglo).

#### **Czas aplikowania**

Jako wskazówkę stosuje się następujący czas aplikowania:

	Średnica brodawki
Brodawki zwykłe i brodawki podeszwowe na palcach i łuku stopy	Mniejsze niż 2,5 mm
Brodawki zwykłe i brodawki podeszwowe na palcach i łuku stopy	2,5 - 5,0 mm
Brodawki zwykłe i brodawki podeszwowe na palcach i łuku stopy	Większe niż 5,0 mm
Zrogowaciałe brodawki podeszwowe na piętach i śródstopiu	Wszystkie wielkości

#### **Ostrzeżenia**

Należy przeczytać uważnie ostrzeżenia i uwagi zawarte w ulotce dołączonej do opakowania. Ulotkę produktu zaleca się zachować na przyszłość.



Skład

apteka

Pojemnik pod ciśnieniem wypełniony 50 ml (w dniu produkcji) eteru dimetylowego w postaci sprężonego gazu ciekłego. Do aplikowania na brodawkę zimna generowanego przez substancję kriogeniczną służy specjalnie urządzenie aplikacyjne (aplikator).