



# Excilor Leczenie 2w1 Brodawek i Kurzajek

Cena: 29,90 zł



## Opis słownikowy

Producent	MAGNAPHARM
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Postać

Aplikator

### Opakowanie

1 aplikator, 5 pianek jednorazowych, 1 instrukcja

### Działanie

**Excilor Leczenie 2w1 Brodawek i Kurzajek** to unikalny wyrób medyczny przeznaczony do samodzielnego stosowania w celu szybkiego i skutecznego leczenia brodawek na dłoniach i stopach, który:

- Łączy 2 metody leczenia: krioterapię oraz terapię kwasową,
- Skutecznie leczy brodawki i kurzajki w zaledwie 5 dni\*,
- Działa skutecznie i szybko\*,
- Przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia

\* dwa badania kliniczne, n=82, dane w dokumentacji

### Stosowanie



- Dzień 1: aplikacja substancji zamrażającej . Dorośli i dzieci: tylko jeden raz.
- Dzień 2, 3, 4, 5: aplikacja żelu. Dorośli: 2 razy dziennie; dzieci 4–12 lat: 1 raz dziennie.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcją używania lub filmem instruktażowym na stronie - [LINK](#).

Przed rozpoczęciem leczenia wielu brodawek należy leczyć tylko jedną brodawkę w celu sprawdzenia efektu działania na skórze.

Po aplikacji należy unikać ekspozycji na światło słoneczne przez 4-6 tygodni.

Zaleca się, aby aplikowanie u dzieci wykonywały osoby dorosłe.

### Ostrzeżenia

Nie stosować preparatu:

- Jeśli brodawka znajduje się na obszarze ciała innym niż dłoń lub stopa;
- Na krwawiącą, podrażnioną, zaczerwienioną skórę lub skórę wykazującą jakiegokolwiek oznaki stanu zapalnego, takie jak świąd lub obrzęk;
- Na brodawki starcze, pieprzyki, ciemne plamy na skórze, pęgi, brodawki wodne (mięczak zakaźny), brodawki łojotokowe lub złuszczone naskórek;
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy dana zmiana skórna jest brodawką;
- W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

### Środki ostrożności

- W celu zachowania higieny osobistej leczenie powinno być wykonywane tylko przez jednego użytkownika
- Pianki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Umyć ręce bezpośrednio po użyciu z ominięciem leczonego obszaru. W przypadku leczenia brodawki na dłoniach odczekać 5 minut
- W przypadku cukrzycy, słabego krążenia krwi lub chorób skóry, przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem.

### Skład

Cryo-Active™ (substancja zamrażająca), TCA-Active™ (na bazie kwasu trichlorooctowego), Carbopol, Woda.