



apteka
w sieci

FERTI-LILY Kubeczek wspomagający zapłodnienie x 1 szt.

Cena: 131,45 zł



Opis słownikowy

Producent	FERTI-LILY
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Kubeczek

Opakowanie

1 szt.

Działanie

Wyrób medyczny **FERTI-LILY** w postaci kubeczka wspomagającego zapłodnienie opracowany został w celu zapewnienia pomocy parom, które starają się o dziecko. Kubeczek wykonany jest z miękkiego materiału, jest wygodny i łatwy w aplikacji. Umieszczony jest w pochwie po stosunku zakończonych ejakulacją, dzięki czemu utrzymuje nasienie blisko szyjki macicy, w środowisku śluzu szyjkowego. Powoduje to, że większa ilość plemników ma szansę przeżyć i dotrzeć do wnętrza macicy, zwiększając tym samym szansę, że jeden z nich dotrze do komórki jajowej i dojdzie do zapłodnienia.

Kubeczek **FERTI-LILY** produkowany jest w Szwajcarii i wykonany jest ze 100% silikonu medycznego. Jest trwały, elastyczny, naturalny i biokompatybilny, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny w stosowaniu wewnętrznym. Kubeczek nie zawiera hormonów.

Kubeczek można stosować wielokrotnie, aż do 6 cykli miesięcznych. Produkt może pozostawiać w pochwie do 1 godziny, wydłużając tym samym czas, w którym plemniki mogą dostać się do wnętrza macicy.

Kubeczek **FERTI-LILY** utrzymuje nasienie w jednym miejscu, dzięki czemu możesz swobodnie wstać, skorzystać z toalety, wziąć prysznic lub robić cokolwiek innego.



Oddawanie moczu po stosunku pomaga zapobiegać zakażeniom układu moczowego (ZUM).

Wskazania

Wspomaganie zapłodnienia.

Sposób użycia i utrzymanie kubeczka w czystości

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Ostrzeżenia

- Kubeczek należy stosować według instrukcji.
- Podczas pierwszego użycia można odczuć lekkie skurcze.
- Nigdy nie należy wyciągać kubeczka na siłę. Jeśli wytworzy się podciśnienie lub wyczuje się opór, można włożyć palec do pochwy i zagiąć krawędź kubeczka, aby się odessał, po czym delikatnie pociągnąć za trzonek.
- Kubeczek znajdzie się bliżej ujścia pochwy, po rozluźnieniu i przykucnięciu.
- Nie wolno ciągnąć na siłę za trzonek kubeczka. Pod wpływem nadmiernej siły trzonek może pęknąć. Służy on jedynie do powolnego, stopniowego wyciągania kubeczka - nie należy przy użyciu siły ciągnąć za okrągły element na końcu trzonka.
- Kubeczek nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.
- Nie stwierdzono związku między ZWT (zespół wstrząsu toksycznego) a stosowaniem takich wyrobów jak kubeczek FERTI·LILY. Jeśli wcześniej rozpoznano ZWT, przed zastosowaniem kubeczka należy skonsultować się z lekarzem.
- Kubeczek należy wyrzucać do kosza. Nie wyrzucać go do toalety.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy przerwać stosowanie kubeczka i skonsultować się z lekarzem.