



apteka  
w sieci

# FERTI-LILY Żel wspomagający zapłodnienie 50ml

Cena: 88,34 zł



## Opis słownikowy

Producent	FERTI-LILY
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Żel

### Opakowanie

Tubka 50ml

### Działanie

Żel FERTI-LILY wspomaga zapłodnienie, pomaga zwiększyć komfort i przyjemność podczas seksu. Żel jest izotoniczny i posiada pH, które sprzyja przeżywalności plemników i naśladuje właściwości kobiecej wydzieliny podczas dni płodnych. W skład preparatu wchodzi fruktoza, naturalny cukier obecny w owocach, który dostarcza plemnikom energię potrzebną do poruszania się.


Według badań klinicznych żel FERTI-LILY nie tworzy bariery dla nasienia i plemniki mogą przetrwać dłużej niż 24 godziny w kontakcie z produktem.

### Wskazania

Tymczasowe stosowanie w dniach płodnych cyklu miesięczkowego, w celu złagodzenia suchości pochwy i/lub zwiększenia przyjemności. Korzystanie z testu owulacyjnego może pomóc w określeniu dni w cyklu miesięczkowym o najwyższej płodności.

### Sposób użycia

- Przed pierwszym zastosowaniem należy usunąć zabezpieczenie tubki.

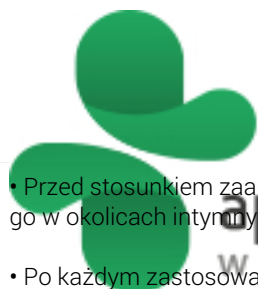

• Przed stosunkiem zaaplikować żel na zewnątrz pochwy lub na trzon penisa. Wycisnąć niewielką ilość żelu na palce i/lub dłoń i nanieść go w okolicach intymnych. Zastosować taką ilość żelu, aby uzyskać pożądane nawilżenie.

• Po każdym zastosowaniu należy szczelnie zamknąć tubkę.

W celu zwiększenia szans na poczęcie zaleca stosowanie żelu razem z kubeczkem wspomagającym zapłodnienie FERTI:LILY.

#### Ostrzeżenia

- W przypadku wrażliwej skóry, można przed pierwszym użyciem nałożyć niewielką ilość żelu na wewnętrzną stronę łokcia, w celu sprawdzenia czy skóra jest wrażliwa na składniki produktu.
- Żel można stosować przez 3 miesiące po otwarciu.
- Żel wspomaga zapłodnienie, nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie chroni przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową.
- Żelu nie należy stosować w przypadku infekcji drożdżakowej lub bakteryjnej ani w przypadku niedawnego podrażnienia lub otarcia okolic intymnych. Stosowanie żelu można wznowić, gdy infekcja całkowicie ustąpi.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów, należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

#### Skład

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.