



apteka  
w sieci

# Gargarin ZATOKI Zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok (1 butelka + 16 saszetek)



Cena: 14,79 zł

## Opis słownikowy

Producent	FARMINA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Proszek

### Opakowanie

Butelka 240ml + 16 saszetek

### Działanie

Wyrób medyczny **Gargarin ZATOKI** przeznaczony jest do płukania nosa i zatok, pomaga rozrzedzać zalegającą wydzielinę i usuwać śluz. Roztwór oczyszcza nosa i zatoki z wirusów, bakterii, alergenów i pyłów, zapewniając równocześnie nawilżenie śluzówki, dzięki czemu wspomaga ochronę dróg oddechowych przed infekcjami.

### Roztwór izotoniczny

Rozpuszczenie jednej saszetki **Gargarin ZATOKI** tworzy roztwór izotoniczny, który pomaga oczyszczać i nawilżać nos i zatoki.

### Roztwór hipertoniczny

Rozpuszczenie dwóch saszetek **Gargarin ZATOKI** tworzy roztwór hipertoniczny, który obkurcza śluzówki i zmniejsza obrzęk nosa, będącym częstym negatywnym objawem kataru siennego i zapalenia zatok.



Schorzenia nosa i zatok takich jak:

- zapalenie zatok przynosowych,
- nieżyt nosa,
- alergiczny nieżyt nosa,
- przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok,
- po kontakcie z alergenami (pyłki roślin, kurz, sierść zwierzęca, pierze),
- profilaktycznie w celu zachowania higieny nosa i zatok,
- oczyszczanie nosa i zatok po kontakcie z powietrzem o dużym stężeniu pyłu.

### Sposób użycia

Płukanie nosa należy wykonać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Nie należy płukać nosa później niż na godzinę przed snem. Do każdego płukania należy przygotować świeży roztwór. Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić temperaturę roztworu, która nie powinna przekraczać temperatury ciała.

- **Roztwór izotoniczny** - zawartość jednej saszetki wyrobu wsypać do butelki i uzupełnić przegotowaną, wystudzoną wodą do linii 240ml.
- **Roztwór hipertoniczny** - zawartość dwóch saszetek wyrobu wsypać do butelki i uzupełnić przegotowaną, wystudzoną wodą do linii 240ml.

Płukanie nosa wykonać zgodnie z instrukcją użytkowania dołączonej do opakowania.

### Uwagi

Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem. Produkt jest bezpieczny i może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Produkt nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

### Ostrzeżenia

Produktu nie należy stosować w przypadku całkowicie zablokowanego nosa, infekcji ucha lub uczucia jego zatkania. Stosowanie produktu należy skonsultować z lekarzem jeśli pacjent miał operację ucha. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu. Do płukania nie stosować nieprzegotowanej wody.

### Skład

100% chlorek sodu Ph.Eur.