



apteka w sieci

Help4skin gojenie ran żel 75g



Cena: 33,13 zł

Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Żel

Opakowanie

Pojemnik 75g

Skład

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoosan sodu, sorbinian potasu

Działanie

- **koloidalny karbomer** - w przypadku ran suchych ma działanie okluzyjne, powstrzymuje parowanie i redukuje utratę płynu przez naskórek
- **karnozyna** - buforuje kwaśne polimery, działając jako przeciwutleniacz.
- **Karbomer** - wchłania nadmiar płynów z wilgotnych, sączących się ran, jak również ochładza i zmiękcza miejsce styczności z plastrem i/lub bandażem.

Wskazania

Rany suche i wilgotne; skaleczenia, zdrapania, otarcia, pęknięcia skóry, rany chirurgiczne, odleżyny, otwarte owrzodzenia nóg, powierzchowne oparzenia, dzieci powyżej 2 lat



Sposób użycia

apteka

- **Rany zamknięte:** oczyścić, zdezynfekować obszar leczony, nałożyć preparat na ranę, unikając kontaktu z końcówką aplikatora, jeśli istnieje potrzeba, nałożyć bandaż lub plaster
- **Rany otwarte:** oczyścić, zdezynfekować ranę, dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą, nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, unikając kontaktu z końcówką aplikatora, założyć plaster lub bandaż.

Żel i plaster (lub bandaż) należy wymieniać co najmniej raz dziennie. Zmniejszyć ilość stosowanego preparatu gdy pojawi się strup.

W przypadku oparzeń przemyć miejsce wodą, po czym przejść do następnych punktów.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu. Nie stosować preparatu na twarz, powieki, oczy, błony śluzowe.