



Heltiso Kompres żelowy ciepło-zimno (13 x 17cm) 1 szt.



Cena: 10,34 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NTRADE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Postać

Kompres żelowy (13 x 17cm)

Opakowanie

1 szt.

Opis

Praktyczny kompres żelowy wielokrotnego użytku do terapii ciepłem i zimnem. Jest elastyczny, może być podgrzewany w kuchenie mikrofalowej i działa do 1 godziny.

Wskazania

- **Terapia zimnem:** zwichnięcia, stłuczenia, urazy, przegrzanie itp.
- **Terapia ciepłem:** lumbago, zeszywnienie karku, reumatyzm, wychłodzenie itp.

Sposób użycia

Schładzanie w zamrażarce: chłodzić w zamrażarce przez co najmniej 2 godziny. Wyjąć z zamrażarki i włożyć do kieszeni odzieży lub zawinąć w tkaninę, aby przyłożyć do leczonego miejsca na ciele.

Podgrzanie w wodzie: podgrzewać we wrzącej wodzie przez nie więcej niż 5 minut. Wyjąć z wody i osuszyć, po czym włożyć do kieszeni



odzieży lub zawinąć w tkaninę, aby przyłożyć do leczonego miejsca na ciele.

Instrukcja podgrzania w kuchence mikrofalowej: podgrzewać w kuchence mikrofalowej przez nie więcej niż 1 minutę przy 650 watach. Wyjąć z kuchenki i włożyć do kieszeni odzieży lub zawinąć w tkaninę, aby przyłożyć do leczonego miejsca.

Ostrzeżenia

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie połykać. Nie rozrywać torebki foliowej. Kompres włożyć do kieszeni odzieży lub zawinąć w tkaninę na czas użycia, aby uniknąć poparzenia. W razie wątpliwości przed użyciem kompresu, a także w przypadku chorób krążenia krwi lub cukrzycy, należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli objawy nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Przechowywanie

Przechowywać z dala od dzieci.

Skład

Glikol propylenowy, błękit metylenowy, hydroksymetylocelulozę, wodę.