



apteka  
w sieci

## HydroClean Solution roztwór 350 ml



Cena: 66,58 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	350ml
Postać	roztwór
Producent	PAUL HARTMANN AG
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Postać

Roztwór

#### Opakowanie

350ml

#### Działanie

**HydroClean Solution** to roztwór pielęgnujący, oczyszczający, nawilżający i nawadniający stosowany razem z materiałami takimi jak opatrunki, bandaże, tampony i wypełniacze do ran ostrych, przewlekłych i zakażonych oraz oparzeń I i II stopnia. Produkt zawiera środki powierzchniowo czynne, zapewniając bezbolesne i wygodne oczyszczenie, potrzebne przed leczeniem ran, poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego.

**HydroClean Solution** zapewnia bardzo pozytywne działanie oczyszczające i nawilżające na aplikowanych obszarach, dzięki czemu wspiera proces gojenia się rany. Produkt może być także stosowany do antyseptycznego oczyszczania i zmiękczenia materiałów opatrunkowych. Opatrunki i bandaże wysuszone i przylegające do rany można zwilżyć produktem **HydroClean Solution** przed ich usunięciem, dzięki czemu można wyeliminować osadzone na nich mikroorganizmy, a materiały opatrunkowe mogą być łatwo usunięte bez powodowania wtórnych urazów rany.

**HydroClean Solution** wykazuje działanie przeciwbakteryjne, zapewniając doskonałe rozwiązanie przeciwdziałające tworzeniu się warstwy biologicznej na bandażach i opatrunkach. Produkt nie hamuje ziarninowania i epitelizacji, nie posiada właściwości drażniących ani nie powoduje bólu. Dodatkowo, **HydroClean Solution** zabezpiecza przed patogenami wielolekoopornymi (np. MRSA, VRE) i grzybowymi.



- Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany pourazowe powstałe w wyniku skaleczeń, otarcia, rozerwania, ugryzienia, zmiżdżenia, użądlenia itp. lub rany chirurgiczne)
- Zakażone lub niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia cukrzycowe, owrzodzenia żyłne, odleżyny (owrzodzenia na skutek ucisku) itp.)
- Zakażone lub niezakażone rany termiczne lub chemiczne (np. oparzenia I i II stopnia, oparzenia chemiczne itp.)
- Rany spowodowane prądem elektrycznym.
- Rany popromienne.
- Obszary wejścia cewników urologicznych.
- Pielęgnacja skóry perystomalnej, przetok i ropni
- Nadaje się do oczyszczenia i pielęgnacji powierzchni rany przed opatrunkiem.
- Nadaje się do antyseptycznego oczyszczenia, zmiękczenia i usuwania materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, tamponów i wypełniaczy do ran, które są wysuszone, zanieczyszczone i przylegają do rany.

#### Ostrzeżenia

**HydroClean Solution** nie należy stosować:

- Na chrząstkę szklistą i w aseptycznych zabiegach chirurgicznych, w uchu środkowym i wewnętrznym oraz w oku (jeżeli HydroClean Solution ma kontakt z chrząstką aseptyczną, należy natychmiast przemyć roztworem Ringera lub roztworem soli fizjologicznej).
- Jeżeli wiadomo, lub gdy podejrzewa się, że pacjent jest nadwrażliwy na którykolwiek ze składników.
- W procedurach dotyczących centralnego układu nerwowego lub opon mózgowo-rdzeniowych,
- Wraz z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami czyszczącymi, kremami, olejami, enzymami itp. Substancje te powinny być całkowicie usunięte z powierzchni rany przed użyciem produktu,
- Do płukania i mycia otrzewnej,
- Nie powinno się go używać u pacjentek będących w pierwszych czterech miesiącach ciąży. W zależności od oceny ryzyka i korzyści jego stosowanie w późniejszym okresie ciąży powinno być oceniane zgodnie z zaleceniami lekarza.

#### Skład

Woda, poloksamer i poliheksanid (PHMB, 0,1%).