



# IRISIN zestaw uzupełniający do płukania nosa, saszetki 30 szt. HELTISO



Cena: 9,64 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Postać	saszetki
Producent	ASA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Postać

Proszek

### Opakowanie

30 saszetek

### Wskazania

Roztwór izotoniczny do płukania nosa i zatok wskazany jest do stosowania:

- w nieżyty nosa współtowarzyszącemu infekcji lub alergii,
- w celu płukania jamy nosa i nawilżenia śluzówki nosa,
- w zapaleniu zatok przynosowych różnej etiologii,
- w celu zachowania higieny nosa,
- w przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- w celu rozluźnienia śluzu i usuwaniu wszystkich rodzajów wydzielin i zanieczyszczeń z jamy nosa,



- dla poprawienia działania systemu obronnego układu oddechowego.

Roztwór hipertoniczny do płukania nosa i zatok wykazuje właściwości osmotyczne, działając na błonę śluzową nosa, redukuje obrzęk śluzówki w nieżycie nosa, które współtowarzyszy alergii lub infekcji oraz zapaleniu zatok.

## Sposób użycia

### Przygotowanie roztworu izotonicznego:

Do butelki wsypać **jedną** saszetkę z chlorkiem sodu i dopełnić zawartość butelki przegotowaną, ostudzoną wodą do umieszczonej na butelce kreski oznaczającej 240ml.

### Przygotowanie roztworu hipertonicznego:

Do butelki wsypać dwie saszetki z chlorkiem sodu i dopełnić zawartość butelki przegotowaną, ostudzoną wodą do umieszczonej na butelce kreski oznaczającej 240ml.

Butelkę zakręcić, po czym wstrząsnąć do całkowitego rozpuszczenia zakrywając palcem otwór wylotowy nakrętki. Stać nad umywalką delikatnie nachylnym i rozpocząć oddychanie przez otwarte usta. Przyłożyć końcówkę do jednego z otworów nosowych.

Butelkę ścisnąć płynnym ruchem w celu wprowadzenia ok. połowy roztworu do jednego otworu nosowego i poczekać aż roztwór wypłynie drugim otworem nosowym. W przypadku dostania się roztworu do gardła nie połykać tylko wypluć. Powtórzyć działanie wprowadzając pozostałą połowę roztworu do drugiego otworu nosowego. Po zakończeniu płukania wydmuchać nos.

Roztwór pozostały w butelce wylać, a następnie dokładnie umyć i osuszyć butelkę i nakrętkę.

## Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa i/lub infekcji ucha. Po odbytej operacji ucha przed zastosowaniem, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w przypadku dowolnej nadwrażliwości na chlorek sodu. Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, zwłaszcza mokrych, niezagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.

## Ostrzeżenia

Do płukania nie używać wrzątku, gorącej lub nieprzegotowanej wody. Do płukania nie należy przyjmować pozycji leżącej przez minimum godzinę. W przypadku stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem. Stosowanie u dzieci powyżej 4. roku życia możliwe tylko pod kontrolą osoby dorosłej.

Należy zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Po przeprowadzeniu płukania może wystąpić delikatnie pieczenie w obrębie jamy nosowej. Butelka przeznaczona jest wyłącznie dla jednego użytkownika. Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

## Skład

Chlorek sodu (ph. Eur.)