

Kompresy z gazy niejałowe 8-warstwowe (7,5 x 7,5cm) 100 szt. BIOCANTO CARE



Cena: 11,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 szt.
Postać	Kompres z gazy
Producent	BIOCANTO
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Kompres z gazy

Opakowanie

100 szt.

Opis

Kompresy z gazy po wyjałowieniu przeznaczone są do bezpośredniego opatrywania ran, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków.

Uwagi

Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną według normy EN-ISO17665-1. W celu sterylizacji kompres należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzać w sterylizatorach parowych w temperaturze 121°C przez 20 min. lub w temperaturze 143°C przez 10 min.

Nie należy stosować bezpośrednio na rany bez sterylizacji. Nie stosować w polu operacyjnym. Wyrób medyczny jednorazowego użytku.