



LAMAmi Termofor z pestkami wiśni

Cena: 11,75 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Termofor
Producent	MEDICINAE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Termofor

Opakowanie

1 szt.

Działanie

Termofor **LAMAmi** z pestkami wiśni służy do schładzania lub rozgrzewania miejsc. To produkt odpowiedni dla całej rodziny i stanowi całkowicie bezpieczny sposób łagodzenia bólu. Stosowanie termoforu **LAMAmi** nie niesie ze sobą ryzyka poparzenia, odmrożenia, zatrucia substancją wypełniającą termofor, ani wystąpienia reakcji alergicznych.

Wskazania

Stosowanie termoforu na ciepło:

- kolki, bóle brzucha,
- zatwardzenia, skurcze mięśni,
- masaż uspokajający.

Stosowanie termofory na zimno:



- otarcia, stłuczenia,
- bóle uszu, bóle głowy, ukąszenia owadów,
- uderzenia, opuchlizny,
- lekkie poparzenie.

Sposób użycia

Stosowanie termoforu na ciepło:

- w mikrofalówce o mocy 300-600 W, przez max. 1 min.
- w piekarniku rozgrzanym do 120°C, przez około 4 min.
- na grzejniku, aż termofor będzie wystarczająco ciepły i podgrzany.

Stosowanie termofory na zimno:

- termofor umieścić w zamrażarce lub lodówce, w czystym i suchym woreczku foliowym, przez około 30-60 minut.

Ostrzeżenia

Unikać kontaktu termoforu z wodą i substancjami chemicznymi.