

MARIMER BABY Izotoniczny spray do nosa 100 ml

Cena: 23,89 zł



Opis słownikowy

Producent	LABORATOIRES GILBERT
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Spray

Opakowanie

Pojemnik 100 ml

Działanie

MARIMER BABY izotoniczny spray to sterylny, fizjologiczny roztwór wody morskiej, zawierający 100% naturalną wodę morską, uzyskiwaną z terenu Morskiego Parku Przyrody Iroise, która jest bogata w sole mineralne i pochodzące z morza oligoelementy.

MARIMER BABY wskazany jest do codziennego stosowania u niemowląt od 1. dnia życia i małych dzieci, w celu zapewnienia codziennej higieny i nawilżania błony śluzowej nosa. Pojemnik preparatu posiada specjalny aplikator dostosowany do noska dziecka (z wyjątkiem wcześniaków), umożliwiający łatwe i bezpieczne stosowanie. Dodatkowo, jednokierunkowy zawór zaprojektowany został w taki sposób, aby niwelować ryzyko zanieczyszczenia czynnikami zewnętrznymi i zapewnić ochronę roztworu.

Wskazania

Izotoniczny spray **MARIMER BABY** wskazany jest dla niemowląt od 1. dnia życia i małych dzieci:

- do codziennej higieny nosa,
- w celu nawilżenia błony śluzowej nosa,



- w celu usuwania wydzieliny śluzowej nosa,
- w przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Sposób użycia

Rozpylić 1-2 dawki preparatu do każdego otworu nosowego, 1 do 3 razy dziennie, w zależności od potrzeb. Spray izotoniczny MARIMER BABY można stosować codziennie przez dłuższy czas.

Po każdym użyciu umyć końcówkę w gorącej wodzie z mydłem, wypłukać i wytrzeć.

Ostrzeżenia

Nie stosować u wcześniaków. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na wodę morską. Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Roztwór izotoniczny wody morskiej (co odpowiada 9 g/l NaCl), woda oczyszczona.