

MEDELA Wkładki formujące brodawki sutkowe 2 szt.

Cena: 36,41 zł



Opis słownikowy

Producent	MEDELA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Wkładki sutkowe

Opakowanie

Wkładki, 2 szt.

Działanie

Nakładki poddają otoczkę brodawki działaniu delikatnego ciśnienia, stopniowo wyciągając płaską lub wklęsłą brodawkę.

Wkładki posiadają wygodny kształt, który dopasowuje się do piersi. Jeden rozmiar osłonki pasuje do kształtów wszystkim mam. Osłonki nie odznaczają się pod ubraniem, dzięki niskiemu profilowi.

Wskazania

Utrudnione karmienie piersią wynikające z płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych

Sposób użycia

Osłony formujące **Medela** składają się z dwóch części: miękkiej, elastycznej membrany silikonowej, która jest przyjemna dla skóry, oraz części zewnętrznej, w której górnej części znajdują się otwory umożliwiające obieg powietrza i redukujące wilgoć. Kształt osłony został opracowany tak, aby komfortowo i blisko przylegać do skóry, a jego niski profil sprawia, że nakładki nie są widoczne przez ubrania. Aby założyć osłonę, należy wykonać następujące kroki:



- Założyć silikonową membranę na zewnętrzną część, dociskając ją wokół całego obwodu.
- Po złożeniu włożyć osłonę formującą do biustonosza, tak aby otwór w membranie znajdował się naprzeciwko brodawki. Otwory wentylacyjne muszą być skierowane w górę.

W ciągu dnia w osłonach formujących może gromadzić się mleko. Nie należy podawać go dziecku; zamiast tego należy wylać nagromadzony pokarm podczas czyszczenia osłon.

Czyszczenie

Podobnie jak inne akcesoria do karmienia, także osłony formujące wymagają zachowania odpowiedniej higieny. Należy zdezynfekować je przed pierwszym użyciem, a następnie powtarzać tę czynność raz na dzień.

- Należy oddzielić od siebie części muszli i włożyć je do niewielkiego naczynia wypełnionego zimną wodą – najlepiej destylowaną. Jeżeli użyta zostanie woda z kranu, należy dodać do niej łyżeczkę kwasu cytrynowego, który zapobiegnie osadzeniu się kamienia.
- Doprowadzić wodę do wrzenia i pozwolić jej gotować się przez około pięć minut.
- Ostrożnie wylać wodę i rozłożyć części osłony formującej do wyschnięcia na czystej ściereczce.
- Można także użyć torebki do dezynfekcji w mikrofalówce.

Ważne jest także, aby czyścić osłony formujące po każdym użyciu, oddzielając od siebie części osłony, myjąc je łagodnym roztworem czyszczącym, płuczac dokładnie zimną wodą i pozostawiając do wyschnięcia na czystej ściereczce.