

Microdacyn 60 Wound Care płyn do ran 500ml

Cena: 53,88 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|--------------------------|
| Producent | KIKGEL |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |

Opis produktu

Postać

Roztwór

Opakowanie

500ml

Działanie

Microdacyn 60 Wound Care jest wyrobem medycznym do leczenia ran o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, Produkt może być używany do przepłukiwania jamy ustnej, więzadeł, ścięgien, ucha zewnętrznego, spojówki oka. Produkt jest hipoalergiczny, ma właściwości przeciwzapalne, jest bezpieczny dla zdrowych komórek, ma obojętny odczyn pH, a także niweluje nieprzyjemny zapach ran i nie wymaga spłukiwania z ran głębokich. Produkt jest dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.

Sposób użycia

Należy nasączyć kompres roztworem i położyć bezpośrednio na ranę. Powtarzać czynność 2 razy dziennie przez 15 minut, a także podczas każdej zmiany opatrunku. Produkt może być stosowany rutynowo zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran oparzeniowych, ran pourazowych czy silnie zanieczyszczonych.

Nasączenie opatrunku produktem ułatwia jego usunięcie.

Przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



Składniki

40 ppm (0,004%) podchlorynu sodu, 40 ppm (0,004%) kwas podchlorawy, woda oczyszczona