



# Molusk roztwór na skórę 3 g



Cena: 57,08 zł

## Opis słownikowy

Producent	PIERRE FABRE Health Care
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Postać

Roztwór

### Opakowanie

Pojemnik 3g

### Skład

10% roztwór wodorotlenku potasu.

### Działanie

**Molusk** to 10% roztwór wodorotlenku potasu, substancja żrąca o silnie zasadowym pH i działaniu kauteryzującym, która działa zewnętrznie na skórę, denaturując substancje białkowe tkanki.

Mięczak zakaźny (*Molluscum contagiosum*) to łagodna, zakaźna choroba o wirusowym charakterze, wywołana przez pokswirusa. Choroba charakteryzuje się powstawaniem na skórze grudek lub guzków. Występuje często u dzieci, zwykle w wieku od 2 do 5 lat, ale może także występować u młodzieży i dorosłych.

### Wskazania

Miejscowe leczenie zmian skórnych mięczaka zakaźnego (*Molluscum contagiosum*).

NALEŻY DOKŁADNIE PRZESTRZEGAĆ WSKAZÓWEK ZAWARTYCH W "INSTRUKCJI UŻYWANIA"

Produkt może być nakładany wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieci nie powinny mieć kontaktu z produktem i nie powinny go dotykać rękami po nałożeniu przez osobę dorosłą.

#### KROK 1 | NAKŁADANIE

Odkręcić zakrętkę i włożyć aplikator z pędzelkiem do pojemnika. Wyjąć zwilżony aplikator i bardzo ostrożnie nakładać produkt delikatnie dotykając każdą zmianę chorobową końcówką pędzelka (unikać dotykania zdrowej skóry wokół zmiany, ponieważ może to powodować podrażnienia).

Ostrzeżenie: nie wolno dopuścić do kontaktu roztworu ze zdrową skórą ani inną powierzchnią (odzież, delikatne powierzchnie itp.), ponieważ jest to substancja żrąca.

#### KROK 2 | ODCZEKAĆ 1 DO 2 MINUT (SCHNIĘCIE)

Po nałożeniu roztworu za pomocą pędzelka, pozostawić na 1-2 minuty do wyschnięcia. Dopilnować, aby dziecko w tym czasie nie dotykało leczonych zmian.

#### KROK 3 | USUNIĘCIE (SPŁUKANIE)

Po wysuszeniu, należy spłukać leczone miejsce wodą (za pomocą nasączonej gazy), aby usunąć resztki produktu i następnie umyć ręce dużą ilością wody.

#### Ponowna aplikacja:

Powtórzyć powyższe kroki. Do dalszego zastosowania, produkt można przechowywać z aplikatorem w środku.

**Leczenie należy przerwać, gdy tylko pojawi się podrażnienie, zaczerwienienie lub obrzęk. Oznacza to, że leczenie jest zakończone. Należy poczekać kilka tygodni na zniknięcie zmiany.**

*Dla uniknięcia nadkażenia ważne jest, aby nie drapać i nie dotykać leczonych zmian, aż do momentu ich całkowitego zniknięcia.*

---

#### Ostrzeżenia

**PRODUKT ŻRĄCY. STOSOWAĆ JAKO ŚRODEK KAUTERYZUJĄCY. ROZTWÓR NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE NA ZMIANY CHOROBOWE. NALEŻY DOKŁADNIE PRZESTRZEGAĆ WSKAZÓWEK ZAWARTYCH W INSTRUKCJI UŻYWANIA.**

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej dwóch lat, chyba że lekarz nie zaleci inaczej. Nie stosować w miejscach, w których skóra jest cienka lub wrażliwa - takich jak błony śluzowe lub wokół oczu. Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do kontaktu substancji z oczami.

Nie połykać. Nie zaleca się stosowania na twarz. Nie stosować w przypadku zakażenia zmian skórnych w mięczaku zakaźnym. Nie stosować na podrażnioną skórę, jeśli zauważono jakiekolwiek zmiany skórne. Nie nadaje się dla diabetyków, ponieważ leczenie może nie przebiegać tak szybko lub nie być kompletne.

Podczas karmienia piersią nie stosować na te części ciała, które mają kontakt z niemowlęciem. Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników.

Stosowanie produktu może spowodować chwilowe uczucie swędzenia, podrażnienia lub pieczenia. W miejscu po zniknięciu mięczaka zakaźnego (*Molluscum contagiosum*) może wystąpić hiperpigmentacja lub hipopigmentacja, która ustąpi samoistnie.