


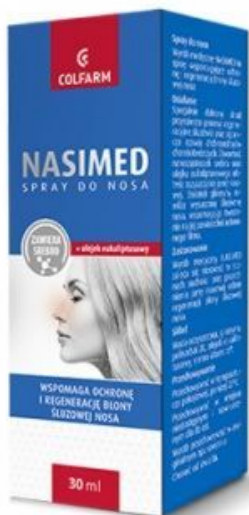

# Nasimed spray do nosa 30ml

Cena: 26,50 zł



## Opis słownikowy

Producent	COLFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Postać

Spray

### Opakowanie

Pojemnik 30ml

### Działanie

Spray **NASIMED** wspiera ochronę i regenerację błony śluzowej nosa. Zawiera specjalnie dobrane składniki aktywne, które przyspieszają procesy regeneracyjne śluzówki oraz ograniczają rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Obecne w preparacie nanocząsteczki srebra i olejek eukaliptusowy ułatwiają oczyszczanie jamy nosowej, a gliceryna nawilża wysuszoną śluzówkę nosa, wspierając tworzenie na jej powierzchni ochronnego filmu.

### Wskazania

Preparat wskazany jest w przypadku stanów suchości oraz podrażnienia jamy nosowej w celu regeneracji błony śluzowej nosa.

### Sposób użycia

Wstrząsnąć przed użyciem. Przed użyciem zaleca się dokładnie oczyścić nos.

Zaleca się stosować po jednej dawce do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie. Aplikator należy wsunąć płytko w dziurkę nosa, a jego końcówkę, tak aby nie dotykała błony śluzowej, skierować na zewnętrzną ścianę nosa.



Przed pierwszym użyciem wyrobu należy kilkakrotnie nacisnąć aplikator w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia.

#### Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu. Unikać kontaktu z oczami. Wyrób przeznaczony do stosowania miejscowego, donosowego.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych. Stosowanie u dzieci zaleca się po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. W okresie ciąży lub karmienia piersią przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nasilenia lub braku ustąpienia dolegliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Skład

Woda oczyszczona, gliceryna, polisorbat 20, olejek eukaliptusowy, srebro aXonnite.