



NoseFrida Aspirator do nosa



Cena: 20,74 zł

Opis słownikowy

Producent	Frida Baby
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Aspirator

Opakowanie

- 1 aspirator NoseFrida
- 4 filtry higieniczne
- 1 etui

Działanie

Oryginalny szwedzki wyrób medyczny **Aspirator NoseFrida** opracowany przez pediatrów i lekarzy laryngologów. Testowany klinicznie aspirator do nosa jest wolny od BPA i ftalanów, przeznaczony jest do stosowania u dzieci od 1. dnia życia, jest łatwy w czyszczeniu i nieinwazyjny.

Wskazania

Usuwanie wydzieliny z nosa u dzieci od 1. dnia życia.

Sposób użycia

W celu uniknięcia przenoszenia się wydzieliny lub bakterii, powinien być założony jednorazowy filtr. Należy przyłożyć grubą rurkę do



nozdrza dziecka tak, aby szczelnie przylegała (nie władać do wnętrza nosa). Czerwony ustnik służy do wysysania śluzu.

- Przed użyciem aspiratora **NoseFrida** wprowadzić roztwór soli fizjologicznej do każdego otworu nosowego, co pomoże w rozrzedzeniu gęstej wydzieliny.
- Rurkę należy poruszać okrężnymi ruchami w otworze nosowym - wydzielina usuwana z nosa będzie widoczna, jak również będzie to słychać.
- Filtr powinien być zmieniany po każdorazowym użyciu, aby zapewnić efektywne odsysanie.

Czyszczenie

Filtr usunąć. Umyć grubą rurkę mydłem i wodą. Cienką rurkę wyczyścić używając kilku kropli alkoholu izopropylowego. Mocno złączyć obie osuszone części, wsunąć obie osuszone części, wsuwając nowy filtr przed następnym użyciem.

Uwagi

Rurki nie należy wkładać do wnętrza nosa, aby nie zranić dziecka w przypadku nagłego poruszenia. Produkt stosować wyłącznie do czyszczenia nosa - nie używać do gardła lub do uszu. Nie dmuchać do czerwonego ustnika gdy rurka jest umieszczona w nosie dziecka. Produkt nie jest zabawką - należy trzymać wszystkie jego części z dala od dzieci. Nigdy nie podłączać przyrządu do maszyny.