



apteka
w sieci

Novativ vision VISOLENS ALL IN ONE płyn do czyszczenia soczewek 360 ml



Cena: 22,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	360 ml
Postać	płyn
Producent	MEDICINAE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Płyn

Opakowanie

360 ml

Działanie


Novativ vision VISOLENS ALL IN ONE to wielofunkcyjny płyn do czyszczenia soczewek kontaktowych, opracowany z myślą o zapewnieniu codziennej higieny i komfortu noszenia soczewek kontaktowych. Płyn posiada pH zbliżone do płynu łzowego oka, dzięki czemu jest delikatny dla oczu i pozwala bardziej naturalne oraz komfortowe noszenie soczewek. **Novativ vision VISOLENS ALL IN ONE** czyści, płucze i dezynfekuje soczewki zgodnie z zaleceniami okulisty.

Wskazania

Czyszczenie soczewek kontaktowych - twardych, miękkich i silikonowo-hydrożelowych.

Sposób użycia

[Czyszczenie soczewek](#)

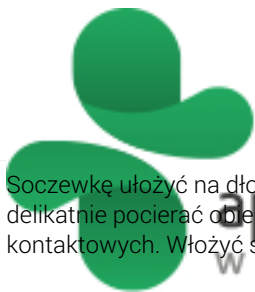

Soczewkę ułożyć na dłoni, dodać 3-4 krople płynu do oczyszczania soczewek kontaktowych na każdą stronę powierzchni soczewki i delikatnie pocierać obie strony przez 20 sekund. Dokładnie spłukać soczewkę dodatkową porcją płynu do czyszczenia soczewek kontaktowych. Włożyć soczewkę do odpowiedniej przegródki w pojemniku na soczewki. Czynności powtórzyć dla drugiej soczewki.

Dezynfekcja soczewki

Napełnić pojemnik na soczewki płynem do czyszczenia soczewek kontaktowych, zamknąć pojemnik i pozostawić w nim soczewki na co najmniej 6 godzin lub na noc. Po tym czasie soczewki są gotowe do użycia. Po każdym użyciu należy wylać płyn z pojemnika na soczewki.

Płukanie soczewek po czyszczeniu i dezynfekcji

Należy wyczyścić, przepłukać i zdezynfekować soczewki zgodnie z zaleceniami okulisty.

Przechowywanie soczewek po czyszczeniu i dezynfekcji

Soczewki mogą być przechowywane w płynie do czyszczenia soczewek kontaktowych przez okres do kilku dni. Jeśli soczewki nie będą noszone przez więcej niż kilka dni, należy powtórzyć proces dezynfekcji.

Pielęgnacja pojemnika na soczewki

Przed pierwszym użyciem dokładnie wypłukać pojemnik na soczewki oraz nakrętki za pomocą płynu do oczyszczania soczewek kontaktowych. Wyczyścić pojemnik na soczewki kontaktowe świeżym do czyszczenia soczewek kontaktowych.

Nigdy nie używać wody. Wymienić pojemnik na soczewki przynajmniej raz na 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami okulisty.

Ostrzeżenia

W celu prawidłowego użytkowania i czyszczenia soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami okulisty oraz wszystkimi instrukcjami zawartymi na etykietach. W przypadku soczewek noszonych więcej niż jeden raz (w przypadku soczewek wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta) należy je czyścić i dezynfekować zgodnie z instrukcjami zawartymi na opakowaniu płynu do oczyszczania soczewek lub zgodnie z zaleceniami okulisty.

Nie należy zmieniać płynu do pielęgnacji soczewek kontaktowych zalecanego przez specjalistę. Nie stosować do jednodniowych soczewek kontaktowych. Soczewki jednodniowe przeznaczone są do jednorazowego, a następnie do wyrzucenia. Soczewki jednodniowe nie są przeznaczone do czyszczenia lub dezynfekcji i noszenia więcej niż jeden raz. Jeśli soczewki nie będą noszone przez więcej niż kilka dni, przed użyciem należy powtórzyć proces dezynfekcji.

Nie używać wody z kranu, wody butelkowanej lub śliny do czyszczenia soczewek lub pojemnika na soczewki. Używać wyłącznie świeżego płynu. Zamknąć butelkę po każdym użyciu. Aby uniknąć zanieczyszczenia, nie dotykać końcówki zakraplacza. Jeśli dojdzie do podrażnienia oczu należy przerwać stosowanie i skonsultować się z okulistą. Zużyć preparat w ciągu 90 dni od momentu otwarcia. Nie stosować po upływie daty ważności. Nie używać w przypadku alergii na jakikolwiek składnik preparatu. Nie stosować bezpośrednio do oka.

Skład

Sterylny wodny, izotoniczny roztwór zawierający chlorek sodu i potasu, edetynian dwusodowy 0,025%, poloksamer, poliheksanid 0,0002%, hialuronian sodu, hypromeloza, bufor sodowo-fosforanowy.