

# NURSICARE Opatrunki dla kobiet karmiących piersią x 6 szt.

Cena: 81,35 zł



## Opis słownikowy

Producent	FERRIS MFG
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Opatrunki

### Opakowanie

6 szt.

### Działanie

Opatrunki **NURSICARE** łagodzą bolesne, popękane, podrażnione oraz zmienione po naświetleniach brodawki. Noszone wewnątrz stanika pochłaniają samoczynny wyciek mleka, minimalizują otarcia i uszkodzenia brodawki wywołane kontaktem ze stanikiem oraz zapobiegają bolesności i podrażnieniom brodawki.


Opatrunki powinny być stosowane natychmiast po pierwszym karmieniu, podczas którego odczuwany był ból sutków. Szybkie zastosowanie produktu minimalizuje uszkodzenia sutka, powstające podczas ssania przez niemowlę.

**NURSICARE** powinien być stosowany do chwili przywrócenia bezbolesnego karmienia. Przy ponownym pojawieniu się jakiegokolwiek dyskomfortu lub bólu brodawek należy natychmiast wznowić stosowanie opatrunków.

### Wskazania

Podrażnione, bolesne, popękane brodawki sutkowe u kobiet karmiących piersią.

### Sposób użycia

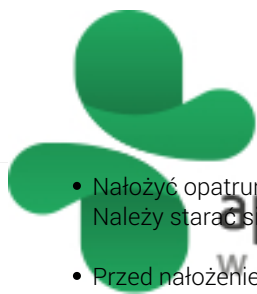

- Nałożyć opatrunek **NURSICARE** na brodawkę piersi tak, aby zadrukowana powierzchnia znalazła się od strony biustonosza. Należy starannie nałożyć opatrunek tak, aby centralna jego część była nad sutkiem.
- Przed nałożeniem opatrunku zaleca się lekko zwilżyć brodawki mlekiem matki lub wodą, aby szybciej aktywować składniki opatrunku i jego działanie.
- Przed karmieniem dziecka lub użyciem ściągacza do mleka, należy przetrzeć pierś wilgotną chusteczką.
- Podczas karmienia dziecka odłożyć **NURSICARE** na czystą powierzchnię (np. na kawałek gazy) niezadrukowaną stroną do góry.

**NURSICARE** może być stosowany profilaktycznie od pierwszego karmienia niemowlęcia, w celu uniknięcia ewentualnych podrażnień lub ran brodawki piersiowej.

Opatrunek można stosować na jedną pierś wielokrotnie, aż do momentu, gdy widoczny na zadrukowanej stronie **NURSICARE**, mokry ślad dosięgnie skraju opatrunku. Taki opatrunek należy zmienić.

Opatrunki nie mogą być prane. Pranie niszczy zawarte w nich substancje czynne i powoduje, że opatrunek staje się nieskuteczny. Po zużyciu należy wyrzucić opatrunek.

#### Uwagi

Opatrunek należy zmieniać, gdy jest mokry, mocno nasączony mlekiem. Jeśli zauważy się znaki infekcji albo, gdy ból brodawek trwa ponad tydzień, jeśli sutki są nadal popękane, krwawią, tworzą się na nich pęcherze lub są nadzwyczajnie bolesne, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.

W czasie stosowania produktu, nie należy smarować brodawki ani samego opatrunku żadnymi maściami ani kremami, ponieważ skutecznie ograniczają one działanie produktu.