



Opatrunek PermaFoam comfort 15 cm x 15 cm rany sączące 1 szt.

Cena: 13,35 zł

Opis słownikowy

Producent PAUL HARTMANN AG

Opis produktu

Postać

Opatrunek

Opakowanie

1 szt 15 cm x 15 cm

Działanie

Opatrunek wyposażony jest dodatkowo w samoprzylepną i chroniącą skórę krawędź mocującą, ułatwiającą jego zakładanie. Specjalna struktura porów warstwy chłonnej umożliwia szybkie odprowadzenie wydobywających się z rany wydzielin i szczątków komórek oraz ich zablokowanie w górnej warstwie opatrunku. Minimalizuje ryzyko wystąpienia maceracji skóry wokół rany. Bardzo wysoki potencjał retencyjny prawie 90% wchłoniętych płynów zostaje zatrzymane w strukturze opatrunku przy zastosowaniu standardowej terapii uciskowej tj. ok. 42 mm Hg jest więc szczególnie polecany do zastosowania w połączeniu z terapią uciskową w przypadku owrzodzeń podudzia. Przyspiesza powstawanie ziarniny. Nie przywiera do powierzchni rany, umożliwiając bezbolesne zmiany opatrunków.

Wskazania

Opatrunek piankowy o wymiarach 15 cm x 15 cm polecany na objęte zakażeniem rany trudno gojące się (np. owrzodzenia podudzi, odleżyny, zgorzel cukrzycowa) z wysiękiem od obfitego do umiarkowanego, znajdujące się w końcowym etapie fazy oczyszczania oraz na etapie budowania nowej tkanki, oparzenia do stopnia 2a. Idealne rozwiązanie dla zaopatrywania owrzodzeń podudzi w kombinacji z terapią kompresyjną.

Sposób stosowania

Wielkość opatrunku PermaFoam należy dobrać tak, aby jego brzegi wychodziły 1-2 cm poza ranę. Jeśli jest to konieczne, wielkość i kształt opatrunku można odpowiednio dostosować przycinając go nożyczkami. W przypadkach mniej skomplikowanych ran można pozostawić PermaFoam przez kilka dni, w zależności od stanu nasycenia opatrunku i ilości wydzieliny. Gdy wydzielina z rany widoczna jest poza obrębem opatrunku należy go jak najszybciej zmienić.