



# Otovent zestaw do ucha (1końcówka nosowa + 5 balonów) 1op

Cena: 55,69 zł



[www.aptekawsieci.pl](http://www.aptekawsieci.pl)

## Opis słownikowy

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Producent   | AXFARM              |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

## Opis produktu

### Producent:

ABIGO MEDICAL AB

### Postać:

Rurka i baloniki

### Opakowanie:

1 rurka donosowa + 5 baloników

### Działanie:

Przedmuchiwanie trąbek słuchowych zestawem Otovent jest modyfikacją metody Valsalvy, Pulitzera. Otovent został stworzony w celu łatwiejszego leczenia dzieci. Stosowanie go może przebiegać w formie zabawy co daje dodatkową motywację. Publikacje kliniczne dowodzą, że więcej niż u połowy dzieci z zaburzeniami wentylacji ucha środkowego, które stosowały Otovent nastąpiła poprawa lub wyleczenie, co zapobiegło dalszym komplikacjom.

### Wskazania:

Do łagodzenia wielu objawów związanych z ujemnym ciśnieniem panującym w uchu środkowym w przypadku dysfunkcji trąbek słuchowych.



**Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować zestawu Otovent przy: ropnych infekcjach nosa i gardła, krwawieniach z nosa, ostrym zapaleniu ucha środkowego.

**Sposób użycia:**

Otovent powinien być stosowany 2-3 razy dziennie przez okres 2-3 tygodni. Rurkę należy szczelnie przyłożyć do jednego z otworów nosowych podczas gdy drugi otwór zamykamy szczelnie palcem. Przy zamkniętych ustach nadmuchujemy balon nosem do wielkości grapefruita. Następnie możemy wypuścić powietrze z balonu przez nos jednocześnie przełykając.