



Cena: 9,78 zł



Opis słownikowy

Producent	3M
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Paski do zamykania ran

Opakowanie

6 pasków, 6 mm x 75 mm

Działanie

Bezinwazyjne paski do zamykania ran, bardzo dobrze i mocno trzymają się w miejscu przyklejenia. Pomocne w przypadku rozcięć skóry, drobnych ran oraz blizn. Przyklejony do powierzchni skóry zamyka ranę i chroni przed infekcjami i wnikaniem brudu oraz drobnoustrojów do jej wnętrza. Paski są hipoalergiczne, łatwe w aplikacji, a cielisty kolor pomaga zamaskować ich obecność.

Wskazania

Do stosowania zewnętrznego, rozcięcia skóry, rany, zamiast szwów, zamykanie ran na skórze. głównie stosowane do bezurazowego zamykania zranień i cięć chirurgicznych po usunięciu szwów lub zszywek, polepszając warunki gojenia rany, po operacji, dodatkowe zabezpieczenie przed rozejściem szwów

Sposób użycia

Oczyścić miejsce w promieniu co najmniej 5 cm od brzegów rany i poczekać do całkowitego wyschnięcia. Listek zgiąć wzdłuż



perforowanej linii i oderwać krawędź. Starannie zbliżyć do siebie oba brzegi rany i zaczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać napięcia podczas przyklejania. Umieścić kilka pasków w niewielkich odstępach 2-3 mm od siebie.

Aby usunąć paski należy ostrożnie ściągnąć oba końce w kierunku miejsca cięcia.

Ostrzeżenia

Jeśli rana jest głęboka i krwawi nieprzerwanie należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy przyklejać pasków na naciągniętą skórę (ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub pojawienia się zaczerwienienia). Nie stosować pasków na zabrudzone miejsca, zainfekowane, na rany kłute. Nie stosować na tłustą, wilgotną, nadmiernie owłosioną lub naprężoną skórę. W przypadku pojawienia się gorączki, bólu, obrzęku, świądu, zakażenia, wysypki lub pieczenia należy skonsultować się z lekarzem. Zdejmować delikatnie.