




# apteka w sieci

## PASOBULL plastry na nos 10 szt.

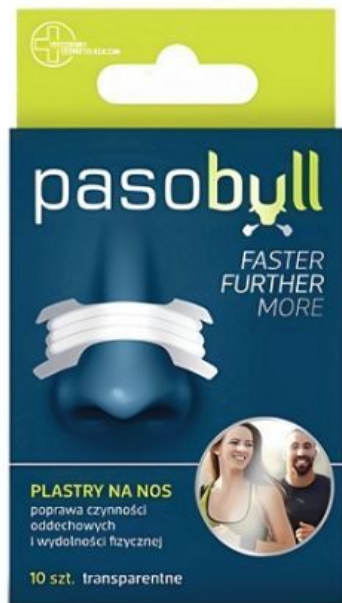

Cena: 16,39 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Postać

Plastry

#### Opakowanie

10 szt.

#### Działanie

**PASOBULL** to plastry oparte na mechanicznym działaniu - rozszerzają nozdrza, dzięki czemu ułatwiają oddychanie, poprawiając ogólną wydolność organizmu. Plastry **PASOBULL** wykonane są z medycznych materiałów, które są bezpieczne dla skóry.

#### Wskazania

Plastry na nos **PASOBULL** mogą być stosowane podczas treningu lub innych form aktywności fizycznej.

#### Sposób użycia

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę nosa.
2. Plaster wyjąć z opakowania i odkleić część ochronną.
3. Plaster nakleić na skórę, w poprzek nosa i przyciskając palcami odczekać kilka sekund, aż plaster będzie przylegać mocno do skóry.

4. W celu usunięcia plastra chwycić za jego krawędź i usuwać powoli wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Czynność odklejania najlepiej wykonywać podczas mycia twarzy lub biorąc prysznic ciepłą wodą.

#### Ostrzeżenia

Wyrób nieinwazyjny, przeznaczony do użytku jednorazowego. Nie stosować jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. Stosować wyłącznie na oczyszczoną, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę. Stosować nie dłużej niż przez 8 godzin w ciągu doby. Nie stosować u dzieci poniżej 5. roku życia. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry natychmiast przerwać stosowanie plastra i zasięgnąć porady lekarza. Plaster nie będzie skuteczny w przypadku trudności w oddychaniu związanych z niedrożnością nosa spowodowaną np. infekcją górnych dróg oddechowych, problemami anatomicznymi, takimi jak skrzywienie przegrody nosowej czy bezdech senny.