



## PASOSLEEP Plastry przeciw chrapaniu (XL) 10 szt.

Cena: 18,48 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Plastry (rozmiar XL: 67 x 20mm)

#### Opakowanie

10 szt.

#### Opis

Plastry przeciw chrapaniu **Pasosleep** działają w sposób „mechaniczny”. Rozszerzają nozdrza ułatwiając oddychanie, dzięki czemu pomagają zmniejszyć chrapanie i łagodzą dyskomfort wywołany przekrwieniem błony śluzowej nosa.

#### Sposób użycia

##### Stosować przed snem.

1. Ostrożnie oczyścić i osuszyć skórę nosa.
2. Plaster wyjąć z opakowania bezpośredniego i odkleić ochronną część.
3. Plaster nakleić na skórę, w poprzek nosa i przyciskając palcami odczekać kilka sekund, aż plaster będzie przylegać mocno do skóry.
4. W celu usunięcia plastra chwycić za jego krawędź i powoli usuwać wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia. Odklejenie plastra najlepiej wykonuje się podczas mycia twarzy lub biorąc ciepły prysznic.



#### Ostrzeżenia

Wyrób **Pasosleep** przeznaczony jest wyłącznie do użytku jednorazowego, zewnętrznego. Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone.

Stosować wyłącznie na oczyszczoną, nieuszkodzoną i niepodrażnioną skórę. Stosować nie dłużej niż 8 godzin. Nie stosować u dzieci poniżej 5. roku życia. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.

Plaster nie będzie skuteczny w przypadku trudności w oddychaniu związanych z niedrożnością nosa wywołaną np. infekcją górnych dróg oddechowych, problemami anatomicznymi, takimi jak skrzywienie przegrody nosowej czy bezdech senny.