




apteka
w siedcu

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Pasta do miejscowego stosowania GC MI Paste Plus o smaku waniliowym 35ml

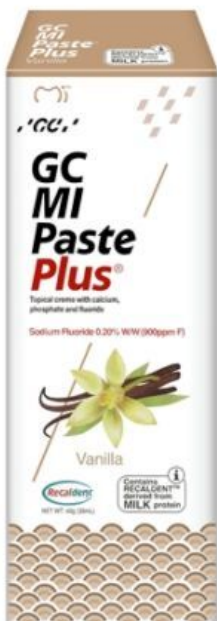

Cena: 77,96 zł

Opis słownikowy

Producent	GC CORPORATION
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Pasta

Opakowanie

Tubka 35ml

Działanie

GC MI Paste Plus to produkt na bazie wody do użytku profesjonalnego, zawierający składnik **RECALDENT** (CPP-ACP: fosfopeptyd kazeiny - amorficzny fosforan wapnia) z włączony fluorem. Poziom fluoru wynosi 0,2% w/w (900 ppm), co odpowiada średniej zawartości w pastach do zębów dla dorosłych.

Kompleks CPP-ACP wprowadzany do jamy ustnej gromadzi się na płycie nazębnej, błonce nabytej, hydroksyapatytach, bakteriach i tkance miękkiej, dostarczając bioaktywny fosforan, wapń i fluor.

Pasta **GC MI Paste Plus** zapewnia dodatkową ochronę dla zębów oraz pomaga neutralizować działanie kwasów produkowanych przez bakterie kwasotwórcze na płycie nazębnej, jak również kwasów pochodzących z innych zewnętrznych lub wewnętrznych źródeł.

Właściwości pasty GC MI Paste Plus:

- buforuje zmiany pH w płycie nazębnej,



- osłabia adhezję oraz wzrost *Streptococcus mutans* i *Streptococcus sobrinus* na powierzchni zęba,
- optymalizuje sposób transportu fluorków do szkliwa i wchłanianie przez nie fluorków.

Smak pasty pomaga stymulować wydzielanie śliny, która wzmacnia skuteczność kompleksu **CPP-ACP**. Dłuższa obecność śliny i kompleksu **CPP-ACP** w ustach wpływa na większą skuteczność działania produktu.

Wskazania

Pasta wskazana jest do stosowania:

- po wybielaniu zębów w gabinecie,
- po profesjonalnym oczyszczaniu zębów,
- do zapobiegania i kontroli nadwrażliwości,
- jako alternatywna metoda fluoryzacji u dzieci od 6-go roku życia,
- po utrudziwiskowym, ręcznym usuwaniu kamienia nazębnego lub oczyszczania powierzchni korzeni,
- podczas leczenia ortodontycznego,
- w celu ochrony powierzchni zębów u pacjentów ze skłonnością do ubytków o charakterze erozyjnym, cierpiących na kserostomię lub zespół Sjögrena,
- u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka próchnicy,
- u pacjentów wymagających specjalnej opieki.

Sposób użycia

Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Ostrzeżenia

Recaldent (CPP-ACP) otrzymywany jest z kazeiny mleka. Nie należy stosować produktu GC MI Paste Plus w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia alergii na białko mleka i/lub wrażliwością lub alergią na konserwanty zawierające benzoesan. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 6. roku życia. U dzieci poniżej 12. roku życia nie jest zalecane stosowanie nocnej aplikacji w domu.

W przypadku kontaktu z gałką oczną, natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem specjalistą. Plamy na odzieży można sprać wodą. Objawy obrzęku naczynioruchowego mogą sygnalizować nadwrażliwość lub alergię na konserwanty zawierające benzoesan lub inne komponenty produktu takie jak środki smakowe. W takim przypadku należy przerwać stosowanie produktu i skierować pacjenta do lekarza specjalisty.

Skład

Pure Water, Glycerol, CPP-ACP, D-sorbitol, CMC-Na, Propylene glycol, Silicon dioxide, Titanium dioxide, Xylitol, Phosphoric Acid, Sodium fluoride, Flavoring, Sodium saccharin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Propyl p-hydroxybenzoate, Butyl p-hydroxybenzoate.