



# PEMPA Termometr bezdotykowy T100



Cena: 102,51 zł

## Opis słownikowy

Postać	Termometr bezdotykowy
Producent	PEMPA JERZY ŻUKOWSKI SP.J.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Termometr bezdotykowy

### Opakowanie

Termometr 1 szt., ulotka, 2 baterie AAA

### Opis

Termometr bezdotykowy **PEMPA T100** to urządzenie wysokiej jakości, które wykorzystuje najnowsze technologie. Zapewnia precyzyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury. Urządzenie przeznaczone jest do regularnych pomiarów temperatury ludzkiego ciała.

### Wskazania

Bezdotykowy pomiar temperatury ludzkiego ciała i obiektów.

### Sposób użycia

- Wcisnąć przycisk ON/OFF. Wyświetlacz uaktywni się i pokaże wszystkie elementy w ciągu 2 sekund.
- Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie na 2 sekundy wynik ostatniego pomiaru z symbolem "M"
- Kiedy zacznie migać symbol °C lub °F i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, termometr jest gotowy do wykonania pomiaru.



- Należy wycelować termometr w środek czoła w odległości nie większej niż 5cm. Aby poprawić dokładność pomiaru, należy usunąć z okolic czoła włosy, po i brud.
- Należy wcisnąć przycisk START i równomiernie przesuwać termometr w kierunku skroni (około 1cm nad łukiem brwiowym). Niebieskie podświetlenie wskazuje miejsce pomiaru. Po 2 sekundach długi sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru. Jeśli obszar skroni nie zostanie uchwycony przed sygnałem dźwiękowym, należy powtórzyć pomiar, przesuwając termometr nieco szybciej.
- Odczytać z wyświetlacza LCD wartość temperatury.

#### **Uwagi**

Należy zapoznać się z instrukcją użytkownika.